

【품목명】의료용게이지 (A64020.01, 1등급)

【모델명】제품 라벨 참조

【품목신고번호】서울 수신 04-775호

【사용목적】인체 조직 등의 치수를 측정하는 기구

【사용방법】

1. 적절한 의료용 게이지를 채택하여 시술부위에 꽂아보고, 정확한 길이와 직경을 측정한다.
2. 측정된 각종 수치는 시술 시 반영할 수 있도록 정밀히 검토한다.

【사용 후 보관 및 관리방법】

1. 사용된 시술기구는 제조원의 매뉴얼에 따라 autoclave로 증기멸균해서 먼지나 습기가 없는 곳에 보관한다.

■ 추가 세부적인 정보는 제조원 매뉴얼(Surgical Manual)을 참조한다.

【사용시 주의사항】

1. 시술 예정 부위의 직경과 용도에 적합한 의료용 게이지를 채택하여 사용하여야 한다.
2. 시술 30분 전에는 반드시 소독을 해야만 한다.
3. 게이지를 잘 관리하여 정확한 측정치가 얻어질 수 있도록 노력을 기울인다.

【보관 또는 저장방법】상온에서 보관하며 습기나 고온 다습한 장소는 피한다.

【중량 또는 포장 단위】1개

【제조번호/제조연월】제품 라벨 참조

【부작용 보고 관련 문의처】한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

【수입판매원】(주)유한양행 / 서울시 동작구 노량진로 74

【제조원】Dentsply Implants Manufacturing GmbH

/ Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany

문안개정연월 2025/01