

【품목명】수동식재사용의료용천공기 (A55020.01, 1등급)

【모델명】제품 라벨 참조

【품목신고번호】서울 수신 04-781호

【사용목적】생체 조직, 뼈 등을 환상으로 구멍 뚫는 기구. 엑스캐베이터(Excavator)를 포함한다.

【사용방법】

1. 용도에 맞는 크기의 의료용 천공기를 선택하여 골에 구멍을 뚫고 골의 구멍 속에 있는 뼈를 채취한다.

【사용 후 보관 및 관리방법】

1. 사용된 시술기구는 제조원의 매뉴얼에 따라 autoclave로 증기멸균해서 먼지나 습기가 없는 곳에 보관한다.

■ 추가 세부적인 정보는 제조원 매뉴얼(Surgical Manual)을 참조한다.

【사용시 주의사항】

1. 의료용 천공기로 구멍을 뚫을 때에는 과도한 열의 발생을 미연에 방지하기 위하여 충분한 냉각수(식염수)를 뿌려주어야 한다.
2. 시술 30분 전 반드시 소독을 실시하여야만 한다.

【보관 또는 저장방법】상온에서 보관하며 습기나 고온 다습한 장소는 피한다.

【중량 또는 포장 단위】1개

【제조번호/제조연월】제품 라벨 참조

【부작용 보고 관련 문의처】한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

【수입판매원】(주)유한양행 / 서울시 동작구 노량진로 74

【제조원】Dentsply Implants Manufacturing GmbH

/ Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany

문안개정연월 2025/01