

【품목명】치과용임플란트시술기구 (C21010,01, 1등급)

【모델명】제품라벨 참조

【품목신고번호】서울 수신 05-846호

【사용목적】치과용 임플란트를 시술하는 데에 사용되는 기구

【사용방법】

1. ANKYLOS C/X Implant Analog : 임플란트가 supra gingival로 노출되어 식립 되었을 때 사용하는 permador abutment의 인상 뜸 때 사용하며 transfer abutment를 사용하여 인상을 뜬 후 screw와 같이 implant analog에 연결하여 기공실로 보낸다. 기공작업 시 implant analog 모델상에 묻혀서 작업이 된다.
2. ANKYLOS Regular C/X Abutment Analog : Standard abutment로 인상을 뜬 후 transfer cap과 연결되며, 기공실에서 보철제작 시 model 속으로 묻히게 된다. two-piece로 된 laboratory analog는 상부 analog가 분리되어 작업을 용이하게 할 수 있다.
3. ANKYLOS Regular C/X Transfer Post PickUp, ANKYLOS C/X Pick up screw Extension, ANKYLOS Regular C/X Repositioning Post : balance abutment의 인상 뜸 때 사용하며 필요에 따라서 open tray 또는 closed tray를 선택하여 사용한다. open tray 사용 시 인상재가 굳은 후 transfer post에 연결된 transfer screw를 제거하고 implant analog에 연결하여 screw를 잠금 상태로 기공실로 보내서 보철물 제작을 한다.
4. Polymerization sleeve for Syncone: Syncone polymerization sleeve를 syncone abutment의 직경이 가장 넓은 부위까지 안전하게 끼워준다. 이 sleeve는 syncone abutment 위로 흐르는 cold-curing resin이 잇몸부위로 흐르는 것을 막아주고 상치부위를 보호해 준다. 이 sleeve가 없을 때는 아치형의 고무로 덮어서 사용할 수도 있다. 소독된 syncone cap 을 안전하게 syncone abutment 위에 장착한다. 올려진 retainer는 아크릴덴처에 cap을 꼭 잡아준다. 중합반응이 끝난 후 안전하게 sleeve를 제거해서 폐기한다

【사용시 주의사항】

1. 수술 30분 전에는 반드시 소독을 실시하여야 한다.
2. 수술부위에 손상이 가지 않도록 시술기구 및 재료를 다룰 때에는 무리한 힘이 가해지지 않도록 주의한다.
3. 사용 후에는 깨끗이 세척을 하여 항상 청결한 상태가 유지되도록 해야하며, 직사광선을 피하여 습기가 없는 안전한 장소에 보관하여야 한다.

【보관 또는 저장방법】상온에서 보관하며 습기나 고온 다습한 장소는 피한다

【중량 또는 포장 단위】1개

【제조번호/제조연월】제품라벨 참조

【부작용 보고 관련 문의처】한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

【수입판매원】(주)유한양행 / 서울시 동작구 노량진로 74

【제조원】Dentsply Implants Manufacturing GmbH

/ Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany

문안개정연월 2025/01