

【품목명】치과임플란트시술용드릴 (C21020.01, 1등급)

【모델명】제품라벨 참조

【품목신고번호】서울 수신 10-1346호

【사용목적】임플란트 시술에서 임플란트용 핸드피스에 부착하여 골을 삭제하는 기구

【사용방법】

■ 사용 전 준비사항

- 비멸균제품
 - 1) 제품사용 전 반드시 멸균 (고압증기멸균, 121도 19분)으로 하십시오.
 - 2) 시술에 필요한 제품의 구성과 시술기구들의 구비를 확인하십시오.
- 멸균제품
 - 1) 시술에 필요한 제품의 구성과 시술기구들의 구비를 확인하십시오.
 - 2) 멸균된 일회용 제품으로 재사용하지 않아야 합니다.

■ 사용방법

- 1) 골량 및 골밀도를 확인하고 시술목적에 맞는 드릴을 고르십시오.
- 2) 핸드피스에 연결하십시오.
- 3) 알맞은 직경과 깊이로 골을 천공하십시오.

■ 사용 후 보관 및 관리방법

- 비멸균 제품 : 세척, 멸균 후 실온에 보관하십시오.

【사용시 주의사항】

• 사용할 때 주의 사항

본 제품의 표면은 가능한 한 손으로 접촉하지 마시고, 접촉할 경우는 고무 장갑을 끼고 전용공구 이외의 기구는 사용하지 마십시오.

• 보관조건 혹은 저장방법 : 실온 보관

• Single Patient Drill 제품은 일회용으로 재사용하지 마십시오.

【일회용 (재사용 금지)】

【보관 또는 저장방법】실온보관

【중량 또는 포장 단위】1개

【제조번호/제조연월】제품라벨 참조

【부작용 보고 관련 문의처】한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

【수입판매원】(주)유한양행 / 서울시 동작구 노량진로 74

【제조의뢰자】Dentsply Implants Manufacturing GmbH

(Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany)

【제조사】Dentsply IH AB (Aminogatan 1, 431 53 Molndal, Sweden

/ Heliumgatan 1, 431 53 Molndal, Sweden)

문안개정연월 2025/01