

【품목명】치과임플란트시술용스크류드라이버 (C21030.01, 1등급)

【모델명】제품라벨 참조

【품목신고번호】서울 수신 10-1347호

【사용목적】임플란트 시술시 구성품들을 결합하는 과정에서 나사를 조이는 기구

【사용방법】

■ 사용 전 준비사항

- (1) 제품사용 전 반드시 멸균(고압증기멸균, 121도 10분 등)한다.
- (2) 시술에 필요한 제품의 구성과 시술기구들의 구비를 확인한다.

■ 사용방법

- (1) 스크류드라이버를 핸드피스에 단단히 고정시킨다.
- (2) 스크류드라이버를 사용하여 스크류를 죄어 준다.

■ 사용 후 보관 및 관리방법

- (1) 세척, 멸균 후 실온에 보관한다.

■ 세척 및 멸균 방법

세척 및 살균

- (1) 재사용 가능한 제품의 세척 및 살균 시, 치과세척살균기를 사용하거나 수동으로 살균 및 세척 하십시오.
- (2) 수동으로 살균 및 세척한 제품은 세제 또는 화학잔여물의 제거를 위해 물에 헹구어 주십시오.

멸균

- (1) 제조자의 지시에 따라 제품을 포장하거나, 제품을 트레이 또는 지정된 organizer에 놓아두십시오.
- (2) 제품은 134℃(270-275°F)의 진공멸균기에서 3분 이상 멸균하여 주십시오.

【사용시 주의사항】

■ 사용할 때 주의사항

본 제품의 표면은 가능한 한 손으로 접촉하지 마시고, 접촉할 경우는 고무 장갑을 끼고 전용공구 이외의 기구는 사용하지 마십시오.

【보관 또는 저장방법】실온 보관

【중량 또는 포장 단위】1개

【제조번호/제조연월】제품라벨 참조

【부작용 보고 관련 문의처】한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

【수입판매원】(주)유한양행 / 서울시 동작구 노량진로 74

【제조외회사】Dentsply Implants Manufacturing GmbH

(Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany)

【제조사】Dentsply IH AB (Aminogatan 1, 431 53 Molndal, Sweden

/ Heliungatan 1, 431 53 Molndal, Sweden)

문안개정연월 2025/01