

【품목명】치과임플란트시술용드릴 (C21020.01, 1등급)

【모델명】제품라벨 참조

【품목신고번호】서울 수신 15-1562호

【사용목적】임플란트 시술에서 임플란트용 핸드피스에 부착하여 골을 삭제하는 기구

【사용방법】

■ 사용 전 준비사항

- 시술에 필요한 제품의 구성과 시술기구들의 구비를 확인하십시오.
- 멸균 된 포장상태로 제공되며, 재사용 할 경우 제품 사용 전 반드시 멸균하십시오.

■ 사용방법

- 1) 골량 및 골밀도를 확인하고 시술목적에 맞는 드릴을 고르십시오.
- 2) 핸드피스에 연결하십시오.
- 3) 알맞은 직경과 깊이로 골을 천공하십시오.

■ 사용 후 보관 및 관리방법

- 일회용 제품은 사용 후 폐기하며, 재사용 가능한 제품은 매번 사용 후 반드시 세척, 살균 및 멸균하십시오.
- 제품의 세척 및 살균 시, 치과 세척 살균기를 사용하거나 수동으로 살균 및 세척 하십시오.
- 사용 후 잔여 조직이나 뼈 잔해들을 제거하기 위해 따뜻한 물에 담그십시오.
120분 이내에 세척하지 못할 경우 세척액이나 살균액에 담가두어 이물질이 굳는 것을 막아야 합니다.
- 멸균방법 : Steam Sterilization with a pre-vacuum cycle (134℃, 3분간)

※ 25161 Precision Drill EV는 일회용으로 재사용을 금지합니다.

그 외 Drill 제품은 약 10회 재사용이 가능합니다.

■ 상세한 정보는 제조원 홈페이지 및 매뉴얼(Surgical manual)을 참고 하십시오.

【사용시 주의사항】

- ASTRA TECH Implant System EV는 적절한 교육 및 훈련을 거친 치과의사나 기공사에 의해서만 사용 될 수 있습니다.
- Precision Drill EV 제품은 일회용으로 재사용하지 마십시오.

【보관 또는 저장방법】실온보관

【중량 또는 포장 단위】1개

【제조번호/제조연월】제품라벨 참조

【부작용 보고 관련 문의처】한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

【수입판매원】(주)유한양행 / 서울시 동작구 노량진로 74

【제조의뢰자】Dentsply Implants Manufacturing GmbH

(Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany)

【제조사】Dentsply IH AB (Aminogatan 1, 431 53 Molndal, Sweden

/ Heliumgatan 1, 431 53 Molndal, Sweden)