

【품목명】치과임플란트시술용스크루드라이버 (C21030,01, 1등급)

【모델명】제품 라벨 참조

【품목신고번호】수신 19-2448호

【사용목적】임플란트 시술시 구성품들을 결합하는 과정에서 나사를 조이는 기구

【사용방법】

■ 사용 전 준비사항

- 각 절차를 수행하기 전 필요한 모든 구성 요소, 장비 및 재료가 적절한 수량인지 확인하고 완벽하게 작동하는지 확인한다.
- 포장 및 제품의 손상 및 이상 유무를 확인한다.
- 비멸균 상태로 공급되며, 최초 사용 전 반드시 멸균한다.
- ISO 17665-1,2에 따라 습열멸균한다.

■ 사용방법

- 1) 사용 전 드라이버를 세척, 살균 및 멸균한다.
- 2) 임플란트 직경 및 알맞은 size의 드라이버를 결정한다.
- 3) 수술부위의 위치를 설정한 후 드라이버의 손잡이 부분을 가볍게 쥐고 시술하고자 하는 부위에 드라이버를 정확하게 위치시킨다.
- 4) 드라이버가 수술부위에 정확히 위치된 것이 확인되었으면 채택된 드라이버를 유효 적절하게 사용하여 시술을 시작한다.

■ 사용 후 보관 및 관리방법

• 세척 및 멸균

- 1) 사전 세척: 매 사용 이후 즉시 부드러운 나일론 브러시를 이용하여 큰 이물질을 제거한다.
- 2) 적절한 세척 소독기와 세척제 및 중화제가 사용되어야 한다
 - 세척에는 탈염수 또는 이 순도를 만족시키는 물을 이용한다.
 - Washer disinfectant: type G 7836 CD, Miele & Cie, KG, Gütersloh
 - Cleaning agent: neodisher® MediClean (0.5%) / neutralization agent: neodisher® Z (0.1%), Dr. Weigert, Hamburg.
- 3) 제조회사 매뉴얼에 따라 적합한 멸균 파우치에 넣어 증기멸균한다.

방법	주기	온도	노출시간	건조시간
증기멸균	Dynamic air removal (prevacuum)	130°C (270°F) 135°C (275°F)	4분 3분	20분
증기멸균	Gravity displacement	121°C (250°F)	30분	20분

*최소 노출시간 및 작동시간은 제품에 따라 다를 수 있다.

- 멸균한 기기를 먼지가 없는 건조한 장소에 상온 보관한다.

【사용시 주의사항】

■ 일반적 주의사항

- 수술부위에 손상이 가지 않도록 드라이버를 다룰 때에는 무리한 힘이 가해지지 않도록 주의한다.
- 안전을 위해 보호복을 착용한다.
- 구성품 흡입의 위험이 최소화되도록 환자를 배치하고 사용되는 모든 구성품은 삼켜지지 않도록 주의한다.

■ 경고

- 사용 전 반드시 사용설명서를 숙지하십시오.
- 시술기구는 일반적인 치과/외과 처치, 안전, 사고예방에 대한 일반적인 규칙에 따라 의도된 목적(정해진 용도)으로만 사용될 수 있습니다.
- 적절한 교육 및 훈련, 시술계획 및 진단을 포함한 보철, 구강수술에 대한 충분한 증례를 가진 치과의사/의사에 의해서만 사용 될 수 있습니다.

– DENTSPLY Implants Manufacturing GmbH는 사용목적 이외 용도로의
사용으로 인한 손상에 대하여는 책임이 없습니다.

【보관 또는 저장방법】상온 보관

【포장단위】1개

【제조번호/제조연월】제품라벨 참조

【부작용 보고 관련 문의처】한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

【수입판매원】(주)유한양행 / 서울시 동작구 노량진로 74

【제조원】Dentsply Implants Manufacturing GmbH

/ Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany

문안개정연월 2025/01