

【품목명】수동식골수술기 (A67050,01, 1등급)

【모델명】제품 라벨 참조

【품목신고번호】수신 99-286호

【사용목적】골수술시 절골, 절제, 천자, 천공 등에 사용하는 수동식 수술기구

【사용방법】

- 1) 기능을 상실한 fixture에 adapter를 연결하고 wrench와 ratchet wrench를 이용하여 반시계 방향으로 천천히 돌리면서 뽑아낸다.
- 2) fixture가 골에 단단하게 지탱되어 adapter를 파손시킬 우려가 있는 경우 fixture retriever를 사용하여 uni abutment를 반시계 방향으로 돌린다.
- 3) 골융합후 fixture를 제거하는 경우 손상을 최소화시키면서 fixture와 abutment를 제거하기 위해 trephine drill을 사용한다.
- 4) fixture에 연결된 fixture adapter나 abutment가 파손되어 조각을 제거할 경우 contra angle에 fragment fork를 끼워 사용한다.
- 5) 기능을 상실한 fixture에서 abutment를 제거할 경우 abutment에 abutment adapter를 끼우고 ratchet wrench와 wrench를 이용한다.
- 6) fixture에서 abutment를 수리해야 하는 경우 contra angle에 연결된 twin disk로 abutment의 양표면을 평행되게 깎은 후 abutment wrench를 끼워 반시계 방향으로 돌린다.
- 7) attachment와 abutment adapter용 나사가 abutment안에서 파손된 경우 fragment fork를 이용하여 조각을 제거한다.

■ 사용시 주의사항

- autoclave 멸균 (조건: 121°C, 1.0kg/cm², 20분) 또는 소독한 후 사용하십시오.
- 제품표면은 가능한 한 손으로 접촉하지 마시고, 접촉할 경우는 고무장갑을 끼로 전용공구 이외의 기구는 사용하지 마십시오.

【보관 또는 저장방법】실온 보관

【중량 또는 포장 단위】1세트

【제조번호/제조연월】제품 라벨 참조

【부작용 보고 관련 문의처】한국의료기기안전정보원, 080-080-4183

【수입판매원】(주)유한양행 / 서울시 동작구 노량진로 74

【제조회사】Dentsply Implants Manufacturing GmbH

(Rodenbacher Chaussee 4, 63457 Hanau, Germany)

【제조사】DENTSPLY IH AB (스웨덴, Aminogatan 1, 431 53 Molndal, Sweden

/ Heliumgatan 1, 431 53 Molndal, Sweden)

문안개정연월 2025/01