



Behandlungseinheiten

Produktfamilie

 Dentsply
Sirona



Wir sind Dentsply Sirona. Und wir sind für Sie da.

Wir sind der weltweit größte Hersteller von hochwertigen Dentalprodukten- und Technologien.

Gemeinsam mit unseren Partnern ermöglichen wir Zahnärzten auf der ganzen Welt, Millionen von Patienten eine hochwertige zahnärztliche Versorgung zu bieten – für ein gesundes Lächeln. Wir haben es uns zur Aufgabe gemacht, die Zahnmedizin zu verändern, um die Mundgesundheit weltweit zu verbessern, und sind stolz darauf, ein bevorzugter Partner für Zahnarztpraxen, Kliniken, Dentallabore und autorisierte Händler weltweit zu sein.

Und doch ist jede Beziehung zu unseren Kunden persönlich. Das gilt insbesondere für unsere Behandlungseinheiten – wir sind der Partner, **auf den Sie sich verlassen können.**



16.000 Mitarbeiter in 40 Ländern repräsentieren uns in über **120 Ländern.**

Unser internationaler **Hauptsitz** befindet sich in Charlotte, **USA.**

Unsere Behandlungseinheiten werden in **Bensheim, Deutschland,** hergestellt.



So finden Sie sich einfach im Katalog zurecht

Verfügbarkeit

Jedes Produktbild enthält eine Legende mit Abkürzungen der Namen der Behandlungseinheiten. Darin ist angegeben, ob die Ausstattung in der Grundausstattung der jeweiligen Behandlungseinheit enthalten, optional oder nicht erhältlich ist. Rechts sehen Sie ein Beispiel für die Legende anhand der motorisch angetriebenen Kopfstütze.

Die Verfügbarkeit von Optionen und Ausstattungsmerkmalen kann je nach Land variieren.

	Axano	Axano Pure	Sinius	Intego Pro	Intego
Basisausstattung					
Zusatzausstattung					
Nicht verfügbar					



Steigern Sie die Effizienz mit innovativen Behandlungseinheiten

Dentsply Sirona Zahnarztstühle sind viel mehr als nur Behandlungstühle, sie sind Behandlungseinheiten und damit mehr als nur eine unverzichtbare Ausstattung.

Sie sind eine Investition in Qualität, Technologie, Patienten- und Anwenderkomfort. Damit können Sie zur Steigerung der Effizienz Ihrer Zahnarztpraxis beitragen und Ihr Behandlungsspektrum erweitern.

Sie erhöhen die Sichtbarkeit Ihrer Praxis und ebnen den Weg für mehr Umsatz. Dentsply Sirona bietet drei verschiedene Produktlinien von Behandlungseinheiten an: Axano, Sinus und Intego.

Axano



Sinius

Intego





Axano >



Axano Pure >



Sinius/TS/CS >



Intego Pro TS/CS >



Intego TS/CS >

Axano

Innovation trifft Faszination

Axano steht für ein außergewöhnliches Behandlungserlebnis. Das exzellente Zusammenspiel aus Innovation, Intuition und den Vorteilen einer modernen Behandlungseinheit, die sich nach Ihnen richtet.



Axano

Übersicht



Motorische Verschiebebahn
6+2 Instrumentenanschlüsse



Motorische Kopfstütze



Smart Control - ergono-
mischer Fußschalter



Massage- und
Lordosefunktion



Smart Touch Display



Integrierte
Therapiefunktionen



22" Sivation-Monitor




SiroCam AF+



DS Core



Integrierte
Desinfektionsanlage

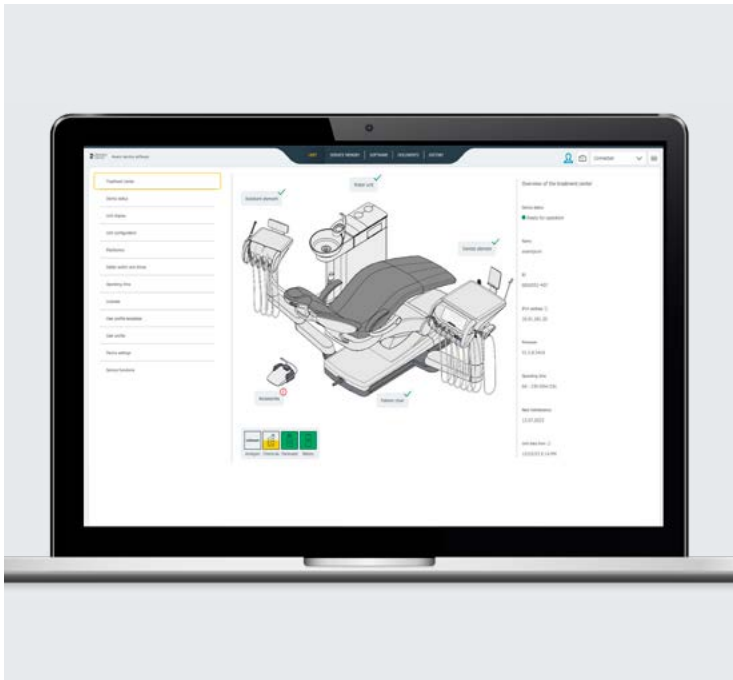

Service Software



LEDview Plus

Axano Pure

Intuitiv einfach mehr

Mit Axano Pure hält eine intuitive Technologie Einzug in die Zahnmedizin. Es erfordert keine komplizierte Einarbeitung und die Workflows lassen sich leicht an Ihre Bedürfnisse anpassen.



Axano Pure

Übersicht



Manuelle Verschiebebahn
6+1 Instrumentenanschlüsse



Motorische Kopfstütze



Smart Control - ergono-
mischer Fußschalter



Lordosefunktion



Smart Touch Display



Integrierte
Therapiefunktionen



22'' Sivation-Monitor




SiroCam AF+



DS Core



Integrierte
Desinfektionsanlage

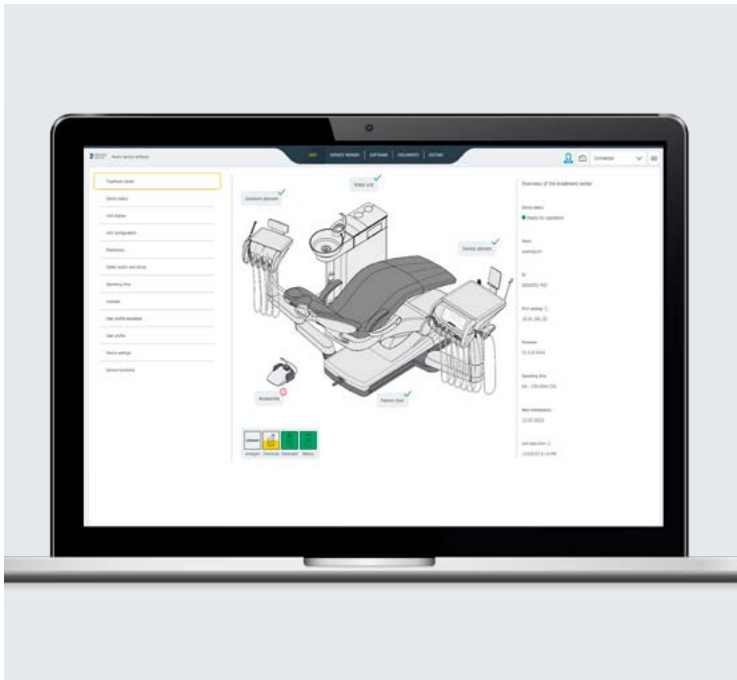

Service Software



LEDview Plus

Sinius

Mehr Effizienz

Die kompakte Sinius spart Platz und überzeugt durch Effizienz und Flexibilität. Sie vereint intuitive Bedienung und zahlreiche integrierte Funktionen für einen komfortablen Workflow und einen erfolgreichen Praxisalltag.




Sinius

Übersicht



Manuelle Verschiebebahn
5+1 Instrumentenanschlüsse

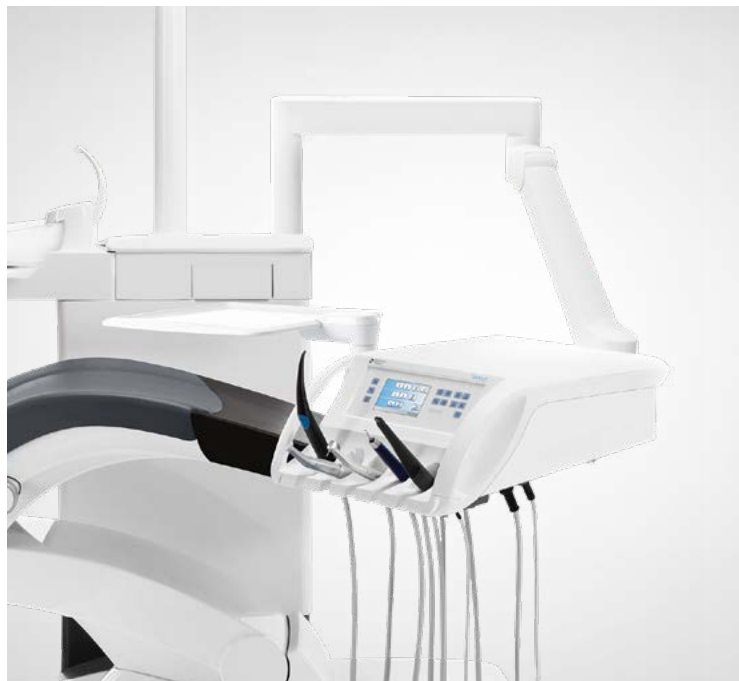

Mit Schwebetisch
5+1 Instrumentenanschlüsse



Mit Schwingbügel
5 Instrumentenanschlüsse



Motorische Kopfstütze



Smart Control - ergono-
mischer Fußschalter



Lordosefunktion



EasyTouch Display



Integrierte
Therapiefunktionen



22" Sivation-Monitor



SiroCam AF+



Integrierte
Desinfektionsanlage



LEDview Plus

Intego Pro

Alles, was ich brauche

Der stilvolle und effiziente Intego Pro bietet hohe Qualität und Zukunftssicherheit. Wählen Sie zwischen zwei Gerätevarianten (Schwebetisch oder Schwingbügel). Intego Pro ist als Rechts- oder Linkshänder-Variante mit Turn-Funktion erhältlich.



Intego Pro

Übersicht



TS – mit Schwebetisch
5+1 Instrumentenpositionen



CS – mit Schwingbügeln
5 Instrumentenpositionen



Option Turn für Rechts-/
Linkshänder konvertierbar



Doppelgelenk-Kopfstütze



Kabellose elektronischer
Fußschalter



Armlehnen links/rechts



EasyPad Display



EasyTouch Display mit
Endodontie-Funktion



22" Sivation Monitor



SiroCam AF+



Integrierte
Desinfektionsanlage



LEDview Plus

Intego

Performance, der Sie vertrauen können

Das ergonomische Design bietet Ihnen und Ihren Patienten hohen Komfort. Die kompakte Wassereinheit mit Frischwasserflasche kann zur kontinuierlichen Desinfektion der Wasserleitungen verwendet werden und erleichtert die Einhaltung der entsprechenden Vorschriften. Intego ist auch als Links-/Rechtshänder-Version erhältlich.



Intego


Überblick



TS – mit Schwebetisch
5+1 Instrumentenpositionen



CS – mit Schwingbügel
5 Instrumentenpositionen

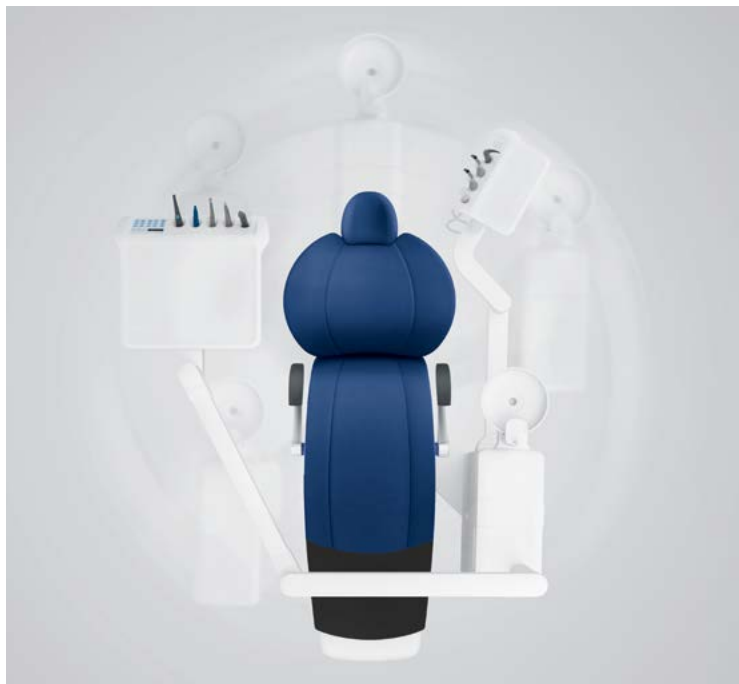

Option Turn für Rechts-/
Linkshänder konvertierbar



Doppelgelenk-Kopfstütze



Elektronischer Multifunktions-
Fußschalter



Armlehnen links/rechts



Schwenkbares Zusatztray
für Arztelement CS



Zusatztray für Arztelement
TS



Komfort Assistenzelement



Mundspülbecken, weiß



Fremdgeräteanschluss



LEDlight Plus



Unsere Design-Philosophie

Ästhetik und Funktion harmonisch verbunden

Gutes Design fällt auf. Großartiges Design bleibt in Erinnerung. Wir konzentrieren uns auf Designkonzepte, bei denen die Form der Funktion folgt, Ergonomie auf Intelligenz trifft und hohe Hygienestandards erfüllt werden.

Wir kombinieren hohe Nutzerfreundlichkeit mit Materialien, die Qualität, Langlebigkeit und Leistungsfähigkeit vereinen.

So entstehen zeitlose Designs, eine Symphonie aus Ästhetik und Funktionalität sowie ein modernes Erscheinungsbild für Ihre Praxis, das auch nach Jahren nichts von seiner Ausstrahlung verliert.





Design Kollektion


Komfort und Qualität: Ihre Sitzpolster-Optionen

Sie haben zwei Optionen für die Polsterung, die Ihren Patienten während der Behandlungen höchsten Komfort und Entspannung bieten. Wählen Sie zwischen unseren Premium- und Lounge-Polstern, die sich beide durch hochwertige Materialien und handwerkliche Verarbeitung auszeichnen.



Lounge-Polster

- Weiches, angenehmes Oberflächenmaterial und bequeme Polsterung
- Effektvolle Kontrastnähte in verschiedenen Farben
- Dynamisches Design mit integrierter Fußstütze
- Robust, leicht zu reinigen und zu desinfizieren

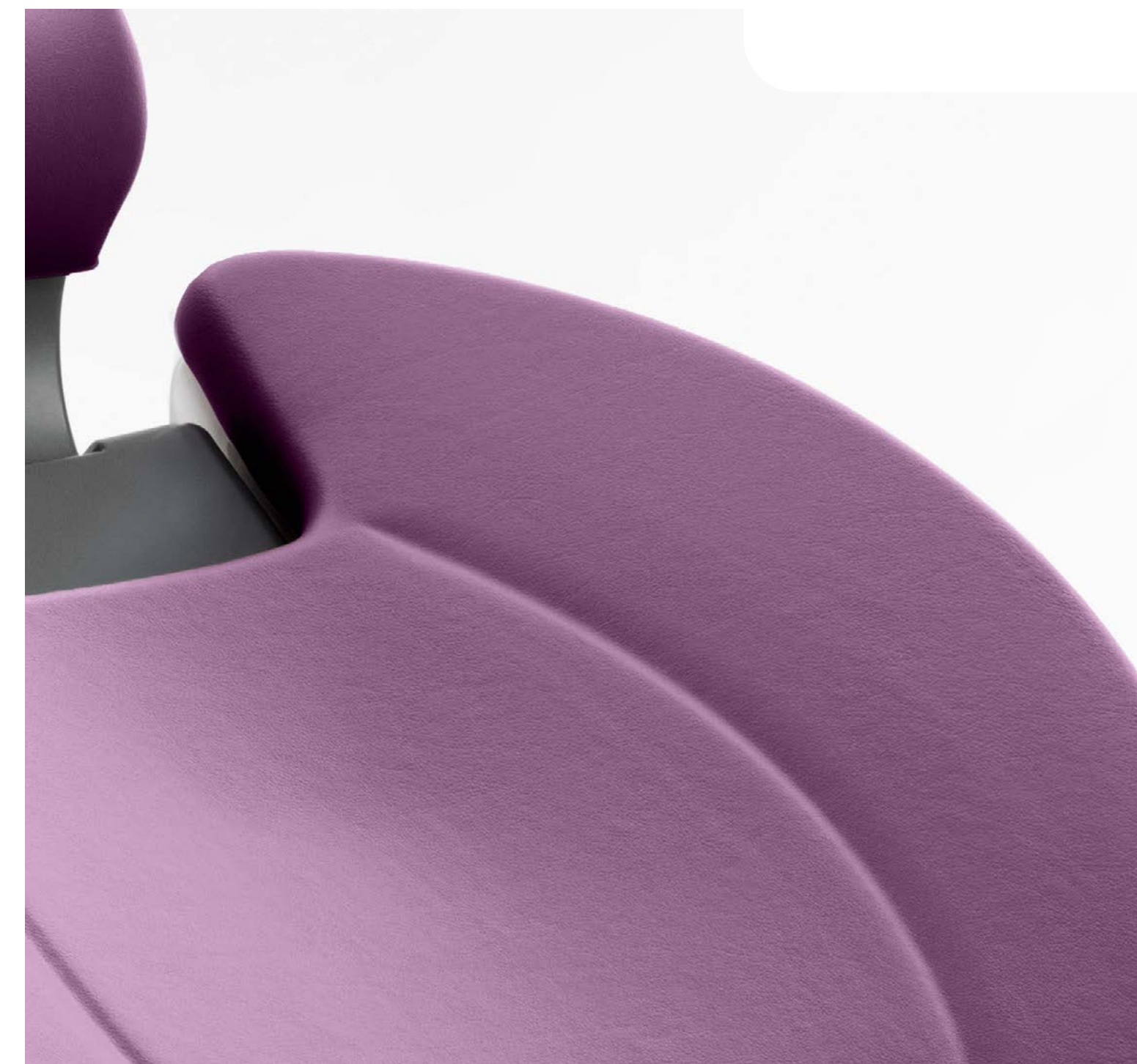

Premium-Polster

- Hochwertiges, nahtloses Polster
- Extra flaches Design für einen sehr großen Arbeitsbereich unterhalb der Rückenlehne
- Hoher Komfort, auch bei langen Behandlungen
- Als Klima-Premium-Polster* erhältlich, um die Stauwärme im Sitz- und Rückenbereich zu reduzieren

*In der Axano-Grundausrüstung enthalten, optional für jede Behandlungseinheit mit motorisch verstellbarer Kopfstütze

Design Kollektion

Design & Farben

Wir haben uns darauf konzentriert, dass all unsere Behandlungseinheiten mit hoher handwerklicher Qualität gefertigt und robust gebaut sind, um eine außergewöhnliche Langlebigkeit zu erzielen, die dem täglichen Gebrauch über Jahre hinweg standhält.

Darüber hinaus können Sie aus verschiedenen Polsterfarben wählen. Für den optimalen Komfort Ihrer Patienten steht Ihnen auch die bequeme Lounge-Polsterung zur Verfügung.

Diese Option ermöglicht Ihnen weitere individuelle Gestaltungsmöglichkeiten, wie beispielsweise die Auswahl der Nahtfarben.

” ZUSÄTZLICHE AUSSTATTUNGSOPTIONEN MACHEN ES EINFACH, DIE BEHANDLUNGSEINHEIT WEITER ZU INDIVIDUALISIEREN.

Polsterfarben


Die elegante Welt



Die natürliche Welt



Die vitale Welt

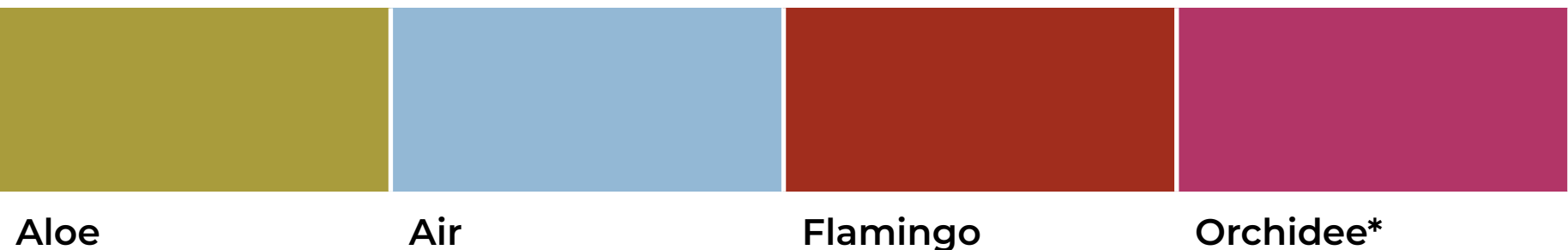

Nahtfarben



Individuell besticktes Kopfpolster**

*Verfügbare Farben für das Lounge-Polster
**Nur für motorisch verstellbare Kopfstützen verfügbar

Funktionen

- Ergonomie & Komfort >
- Therapiefunktionen, Lösungen & Service >
- Infektionsprävention >
- Technologie >

Ergonomie & Komfort

- Behandlungskonzepte >
- Kopfstützen >
- Vertikale Mundpunktpositionierung >
- Das Split-Konzept >
- Fußsteuerung >
- Patientenkomfort >
- Arbeitsstühle >





Ergonomie & Komfort

Unser ergonomisches Konzept: eine Behandlung in harmonischer Balance

Ergonomie lässt sich als das Zusammenspiel zwischen Mensch und Maschine verstehen. In Ihrem Arbeitsalltag erleben Sie ständig Situationen, in denen genau dieses Miteinander zwischen Ihnen und Ihrer Ausstattung entscheidend für den Behandlungserfolg und Ihre eigene langfristige Gesundheit ist.

Die Behandlungseinheit spielt dabei eine wesentliche Rolle, da Sie hier den größten Teil Ihrer Arbeitszeit verbringen. Deshalb ist es von großer Bedeutung, dass sie optimal auf Ihre Anforderungen abgestimmt ist.

Die Behandlungseinheiten von Dentsply Sirona bieten zahlreiche Lösungen für eine komfortable Behandlung – **für Zahnärzte, Patienten und das Team.**



Ergonomie & Komfort

Behandlungskonzepte

Wir bieten eine große Auswahl an Behandlungseinheiten, die den drei gängigsten ergonomischen Behandlungskonzepten entsprechen und in verschiedenen Komfort- und Integrationsstufen erhältlich sind.

Jedes Konzept legt Wert auf hohen Komfort und einfache Bedienung entsprechend Ihrer Arbeitsgewohnheiten und Ihrer Praxisausstattung. Unsere beidhändig bedienbaren Versionen erfüllen die ergonomischen Anforderungen sowohl für Rechts- als auch für Linkshänder.

Entdecken Sie diese Lösungen, um die passende Einheit für Ihre Praxis zu finden und Ihren Patienten eine hervorragende Versorgung zu bieten.



Konzept: Motorische Verschiebebahn

- Smart Delivery Pro bringt mit seiner motorischen Verschiebebahn das Arztelement in Griffweite – handfrei und ohne Kraftaufwand
- Zeitsparende Workflows
- Passt sich mit der automatisierten Höhenverstellung an Ihre Arbeitsweise an



Konzept: Manuelle Verschiebebahn

- Ergonomisches Behandlungskonzept
- Das Arztelement lässt sich manuell leicht vor- und zurückbewegen
- Optimale Greifwege durch Einschwenken des Arztelements

Ergonomie & Komfort

Behandlungskonzepte




TS - das Schwebetischkonzept

- Ergonomische Positionierung durch unabhängig voneinander bewegbares Arztelement und Tray-System
- Großzügiges Tray-System mit abnehmbarem und flexibel positionierbarem Tray-Tablett
- Hervorragend für die Vier-Hand-Behandlung geeignet



CS - das Schwingbügelkonzept

- Optimale Positionierung des Arztelements durch mögliche Drehung um bis zu 240°
- Maximale Reichweite der Instrumente von 90 cm
- Ideal für unterschiedliche Behandlungssituationen in Allein- oder Teambehandlung

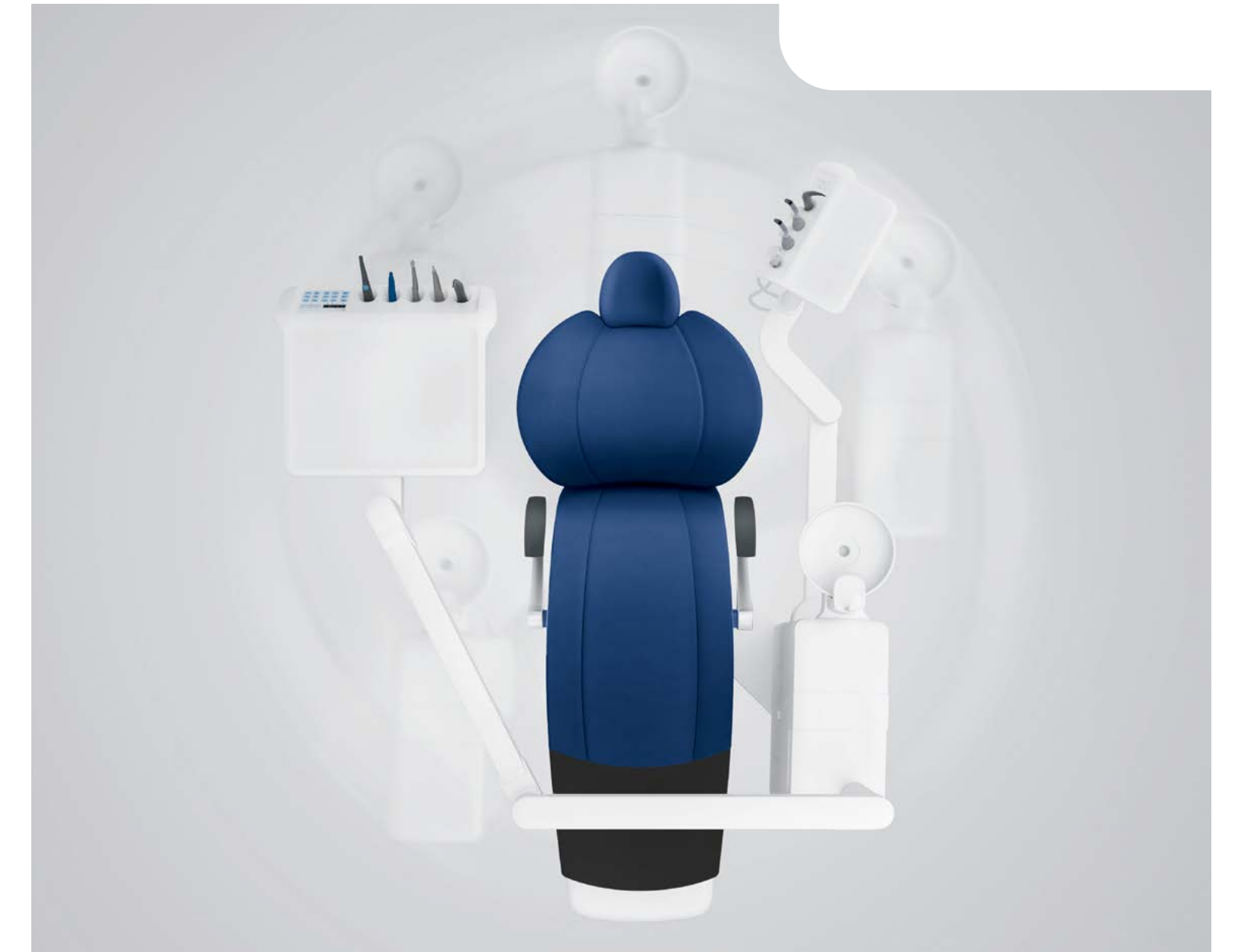

Konzept: Beidhändig & flexibel

- Für Rechts- und Linkshänder gleichermaßen entwickelt
- Optimale Ergonomie ohne Kompromisse bei der Behandlung
- Einzigartiger Drehmechanismus
- Umstellung von Rechts- auf Linkshänderposition innerhalb von 15 Sekunden

Kopfstützen

Behandlungskomfort und optimales Sehen



Motorische Kopfstütze

- Die komfortable Einstellung der motorischen Kopfstütze erfolgt über den Fußschalter, die Bedienoberfläche oder auch manuell an der Kopfstütze.
- Programmierbar mit Behandlungspositionen
- Unterstützt die vertikale Mundpunktpositionierung
- Magnetisches Kopfpolster für flexible Positionierung
- Patientenindividuelle Einstellungen können gespeichert und abgerufen werden*



Doppelgelenk-Kopfstütze

- Einfache Positionierung durch zwei Gelenke
- Schnell an wechselnde Situationen anpassbar
- Einfache Einstellmöglichkeiten für die Behandlung von Kindern und Rollstuhlpatienten
- Stabile Metallkonstruktion





Flache Kopfstütze

- Magnetische Kopfauflage ermöglicht flexible Positionierung
- Anpassbar für Patienten unterschiedlicher Größe
- Für schnelles Wechseln zwischen Unterkiefer- und Oberkieferposition

Vertikale Mundpunktpositionierung

Die richtige Behandlungsposition


Die flexible Höhenverstellung ermöglicht eine optimale Arbeitshöhe durch vertikale Mundpunktpositionierung. Eine Positionierungsautomatik bringt den Patientenmund unabhängig von der Größe des Patienten immer in die gleiche gespeicherte Behandlungsposition für Ober- und Unterkiefer. Diese schnelle und einfache Einstellung spart Zeit und hilft Ihnen, eine gesunde Behandlungshaltung einzunehmen, ohne darüber nachdenken zu müssen.

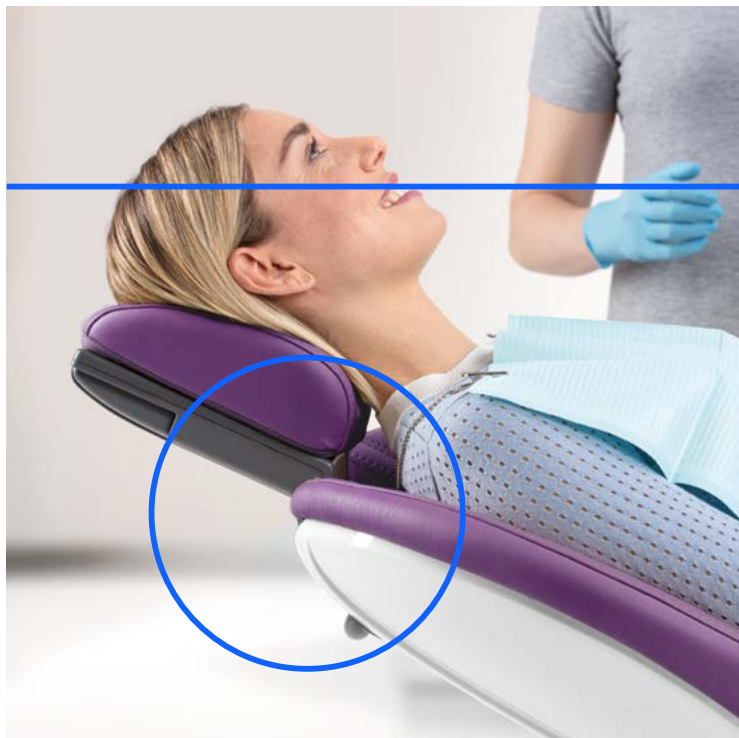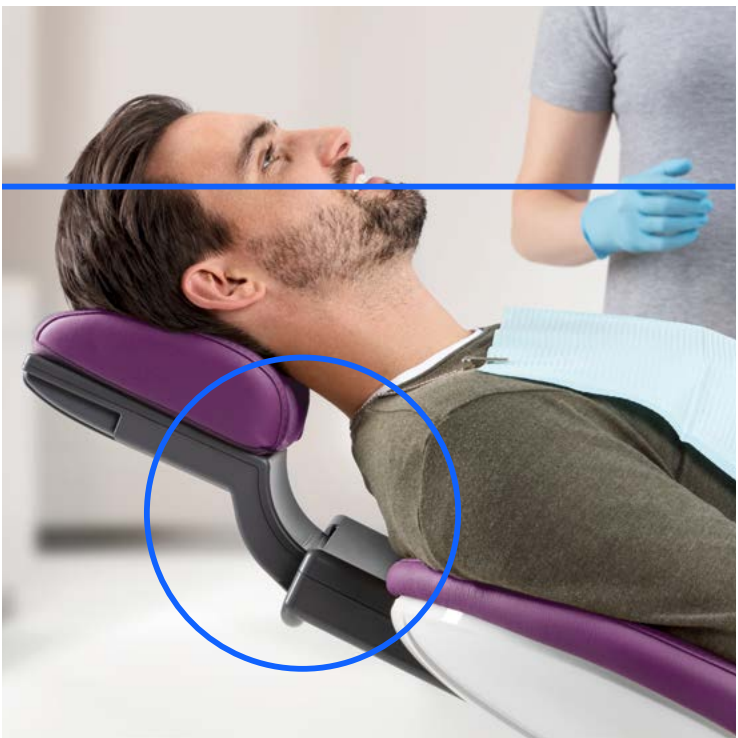

Optimale Greifwege

Das Split-Konzept

Dank des einzigartigen Split-Konzepts von Arztelement und Tray haben Sie einen optimalen Handlungspielraum bei Behandlungseinheiten mit Verschiebebahn. Arzt- und Assistenzelement sowie das Tray sind einfach und unabhängig voneinander positionierbar. So können Sie flexibel zwischen Team- und Alleinbehandlung wechseln und haben jederzeit eine zusätzliche Ablagefläche zur Verfügung.

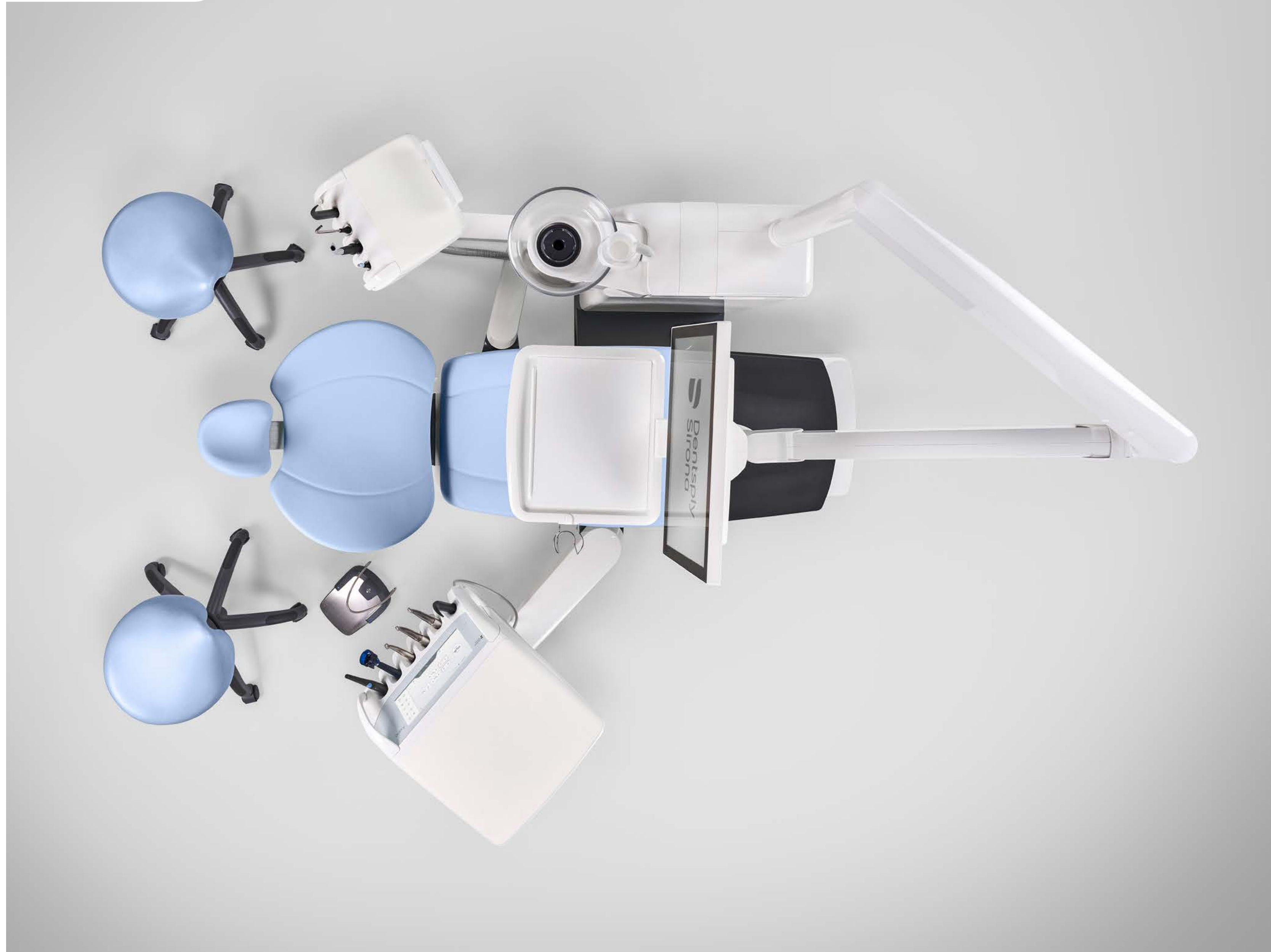

Fußsteuerung

Einfache Bedienung



Smart Control

- Kabelloses multifunktionales Steuerelement mit Bluetooth
- Unterstützt handfreien Aufruf wesentlicher Funktionen
- Sofortiger Zugriff auf alle wichtigen Funktionen
- Intelligente Tastenanordnung und intuitives Design
- Niedriger Energieverbrauch für stabile Verbindungen



Fußschalter Classic

- Vollständige Kontrolle über Instrumente, Spray, Luft und Wasser
- Geschwindigkeitsregelung für elektrisch angetriebene Instrumente
- Handfreie Bedienung der Behandlungseinheit mit Kreuzschalterplatte.
- Sowohl kabelgebunden als auch kabellos erhältlich



Pneumatische Fußsteuerung

- Vollständige Kontrolle über Instrumente, Spray und Luft
- Drehzahlregelung für luftbetriebene Instrumente

Ergonomische Patientenpositionierung

Patientenkomfort



Massagefunktion

- Rückenmassagefunktion für höheren Patientenkomfort während der Vorbereitung, bei Wartezeiten oder Behandlungspausen
- Massagefunktion für einzigartigen Patientenkomfort



Lordose-Funktion

- Bietet optimale Unterstützung der Wirbelsäule
- Individuelle Anpassung zum Ausgleich anatomischer Unterschiede
- Bequem liegende Patienten sind entspannte Patienten



ErgoMotion

- Die kombinierte Bewegung von Rückenlehne und Sitz verhindert eine Überstreckung und Kompression der Wirbelsäule.
- Der Kopf des Patienten bleibt immer in derselben Position auf der Kopfstütze.
- Bei einer Änderung der Behandlungsposition muss die Kopfstütze nicht neu eingestellt werden.

Ergonomie & Komfort

Arbeitsstühle



Hugo – Der Ergonomie-Profi

- Dynamische Rückenlehne
- OptiMotion-Mechanik minimiert den Druck auf die Oberschenkel
- Klimapolster leitet Körperwärme ab
- Hugo Freehand-Version ermöglicht hygienische Sitzhöhenverstellung per Fußdruck



Theo – Der Flexible

- Sattelform
- Einzigartiger Balance-Mechanismus
- Wählbare Polster
- Entlastendes Fußkreuz
- Höhenverstellbar



Carl – Der Allrounder

- Runde Sitzfläche mit komfortabler Polsterung
- Rückenlehne um 360° schwenkbar
- Sitzflächenverstellung aus jeder Sitzposition
- Wahlmöglichkeit zwischen zwei Gasfeder-Längen

Therapiefunktionen, Lösungen und Service

Endodontie >

Implantologie >

Patientenkommunikation >

DS Core >

Service-Software >

Ferndiagnose >





Therapiefunktionen, Lösungen und Service

Optimieren Sie Ihren Workflow mit integrierten Funktionen

Erleben Sie die Vorteile integrierter Funktionen für Endo- und Implantologie in unseren Behandlungseinheiten.

Dank nahtlos integrierter Funktionen minimieren Sie Vorbereitungszeiten, können sich ganz auf Ihre Patienten konzentrieren und haben alles griffbereit.

- Keine zusätzlichen Tischgeräte erforderlich, die aufgestellt werden müssen
- Intuitive Unterstützung durch das Equipment für volle Konzentration und Fokus auf den Patienten
- Minimierung der Vorbereitungszeiten
- Professionelle Tools zur Erklärung und Visualisierung der Behandlungsschritte fördern das Vertrauen der Patienten und die Akzeptanz der Behandlung
- Verbesserte Infektionsprävention im Vergleich zu Vorgängerversionen
- Einfach zu bedienende Instrumente zur Unterstützung der Infektionsprävention



Therapiefunktionen, Lösungen und Service

Endo – Effizient bis an die Wurzel

Die Endodontie-Funktionen unterstützen Ihren Workflow und erhöhen die klinische Sicherheit. Die integrierten Funktionen optimieren dank Voreinstellungen und Anpassungsoptionen jede Behandlung und reduzieren das Risiko einer Revision.

Endo mit integrierter Feilendatenbank

- ✓ Feilenbibliotheken bieten eine Schritt-für-Schritt-Unterstützung bei der Wurzelkanalaufbereitung.
- ✓ Die visuelle Darstellung der Feilendatenbank erleichtert die Aufbereitung.
- ✓ Die präzise Drehmomentsteuerung des Motors gewährleistet eine hohe klinische Sicherheit. Eigene Parameter und Favoriten können ebenfalls gespeichert werden.
- ✓ Die integrierte ApexLocator-Anzeige auf dem 22-Zoll-Sivision-Monitor bietet Ihnen zudem visuelle Unterstützung für Ihren endodontischen Workflow.

Endo ohne integrierte Feilen-Datenbank

- ✓ Mit EasyTouch können 6 verschiedene Drehmoment- und Drehzahleinstellungen sowie reziproke Feilensysteme verwendet werden.
- ✓ Die präzise Drehmomentsteuerung des Motors gewährleistet eine hohe klinische Sicherheit.
- ✓ Die integrierte ApexLocator-Anzeige am EasyTouch verbessert Ihren endodontischen Workflow.





Integrierte Therapiefunktionen

Implantologie - Effizienz erleben

Implantologie wird einfach mit integrierten Lösungen für die Implantatbehandlung. Mit unseren erweiterten Funktionen und individualisierbaren Einstellungen können Sie Ihren Workflow optimieren, wichtige Parameter anpassen und auf den Patienten abstimmen, um präzise Behandlungen durchzuführen, die zu besseren Ergebnissen führen.

- ✓ Eine aktualisierte Implantatdatenbank ermöglicht neue Workflows mit Voreinstellungen für Ihre Implantologiebehandlungen.
- ✓ Mit der integrierten Pumpe für Kochsalzlösung kann die Kühlmittelmenge bedarfsgerecht eingestellt werden.
- ✓ Alle relevanten Parameter wie Drehzahl, Drehmoment und Durchflussmenge der sterilen Kühlflüssigkeit lassen sich individuell einstellen und kontrollieren.
- ✓ Die handfreie Steuerung aller Schritte über die Fußsteuerung verhindert Kreuzkontaminationen und gewährleistet hygienisch sichere chirurgische Eingriffe.





Patientenkommunikation

Lassen Sie Bilder sprechen

Gute Kommunikation ist der Schlüssel zu Ihrem Patienten. Durch die SiroCam AF/AF+ und dem 22"-Sivision-Monitor an der Behandlungseinheit können intraorale Aufnahmen, Röntgenbilder oder Videos direkt an der Behandlungseinheit mit Ihrem Patienten besprochen werden. So können Sie den Behandlungsablauf Schritt für Schritt erläutern, um das Vertrauen Ihrer Patienten in Ihren Therapieverschlagn zu stärken.

- ✓ Klare Visualisierung für die Beratung vor Ort
- ✓ Hilfreiche Tools für eine verständliche Kommunikation mit den Patienten
- ✓ Ordnen Sie Patientenmedien auf dem zentralen Canvas in DS Core an, erläutern Sie die Befunde und Behandlungsoptionen für eine effektive Kommunikation.
- ✓ Zeigen Sie die verschiedenen Medien auf dem Monitor, auf die Sie sich für Ihre Diagnose beziehen.
- ✓ Seien Sie transparent durch die Visualisierung intraoraler Bilder, Röntgenaufnahmen und andere Medien auf dem integrierten 22"-Sivision-Monitor.
- ✓ Teilen Sie angezeigte Daten mit Ihrem Patienten und stärken Sie somit das Vertrauensverhältnis (DS Core-Abonnement erforderlich).



[Einleitung](#)[Produktübersicht](#)[Design & Polster](#)[Funktionen](#)[Pakete & Ausstattungen](#)[Vergleich](#)

DS Core

Fördern Sie das Wachstum Ihrer Praxis mit vielfältigen Funktionen von DS Core



Diagnose¹

Diagnose-Tools


Längenmessungen ganz einfach vornehmen

Smart View

DVT-basierte Darstellung der Anatomie Ihres Patienten²

IOS Hilfe zur Karieserkennung

Erkennen Sie Karies und ermöglichen Sie eine zeitnahe Behandlung³

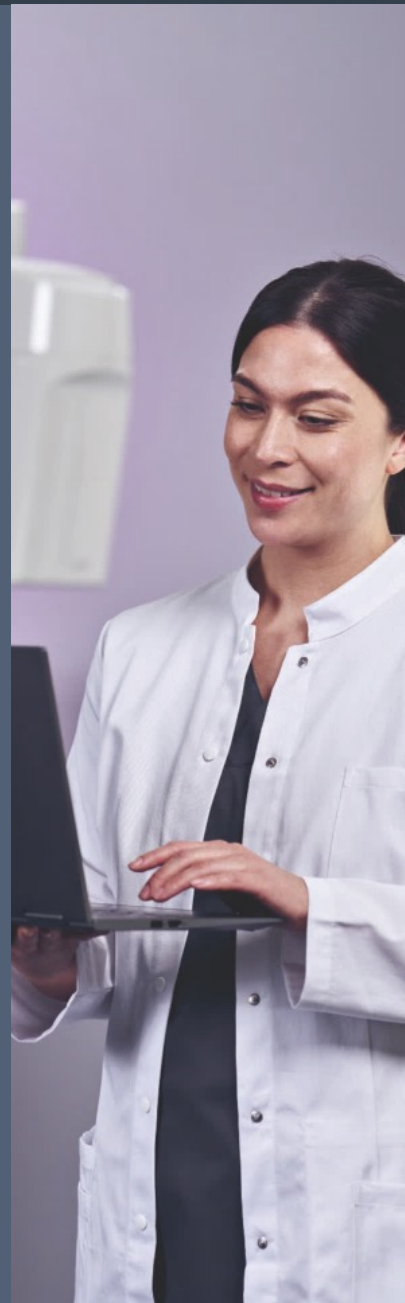

Plan

Behandlungsbereich

Verwalten Sie alle behandlungsbezogenen Dateien und Workflows

SureSmile[®] Simulator

Veranschaulichen Sie den Wert einer SureSmile[®] Aligner-Behandlung

CEREC connected with DS Core
CEREC[®]-Design-Workflow starten und Daten nahtlos übertragen⁶




Make

Fertigung

Verwalten Sie all Ihre Fertigungsaufträge an einem einzigen Ort⁷

Bestellung

Verwalten Sie all Ihre Labor- und Serviceaufträge an einem einzigen Ort

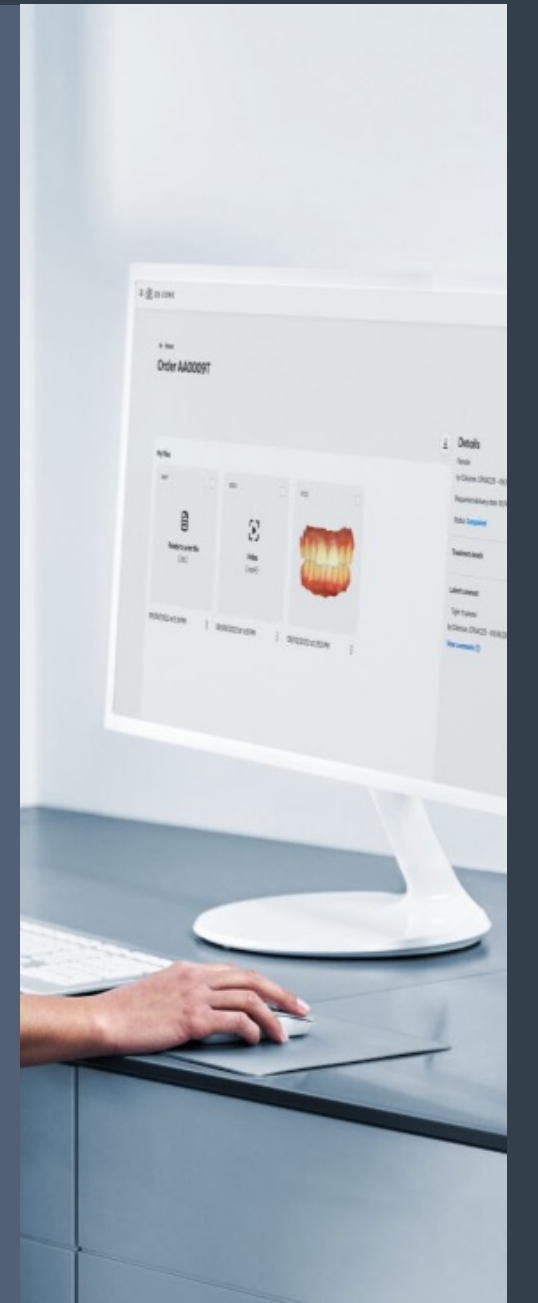

Online-Mediathek & Freigabe

Speicherung⁴ und Anzeige von Patientenmedien an einem Ort, Zusammenarbeit von überall aus

Canvas

Möglichkeit zur Verbesserung der Patientenkommunikation und Stärkung des Vertrauensverhältnisses zu Ihren Patienten

DS Equipment Verwaltung

Steuerung und Kontrolle der durch DS Core unterstützten und vernetzten Geräte⁵

¹ Die Verfügbarkeit der Diagnosefunktion hängt von der lokalen Zulassung des medizinischen Geräts ab. ² Smart View ist kein medizinisches Gerät und dient ausschließlich der Kommunikation mit Patienten. ³ Nur mit Primescan 2 verfügbar. ⁴ DS Core bietet primären Speicherplatz für Bilddateien und Primescan 2. ⁵ Eine Übersicht über Geräte mit „Powered by DS Core“ und „Connected with DS Core“ finden Sie im Abschnitt „Dentsply Sirona Technology Solutions“. ⁶ CEREC 5.3.1-Lizenz erforderlich. ⁷ inLab CAM.

[Einleitung](#)[Produktübersicht](#)[Design & Polster](#)[Funktionen](#)[Pakete & Ausstattungen](#)[Vergleich](#)

DS Core

DS Operative Technologien und Lösungen DS Core

- ✓ Preisgekröntes Design
- ✓ Integrierte Displays für die Patientenkommunikation.
- ✓ Automatisierung der Funktionen und Fußsteuerung für Komfort und Ergonomie
- ✓ Intuitive Benutzeroberfläche mit konfigurierbaren Workflows
- ✓ Geführter Hygieneprozess mit automatisierten Dokumentationsreports
- ✓ Zeigen Sie Intraoralscans neben Ihren Röntgenbildern und anderen Patientenmedien auf dem Bildschirm der Behandlungseinheit.
- ✓ Vereinfachter Zugang zu Patientenmedien auf mobilen Geräten über QR-Code während der Sitzung



Integriert in
das DS
Ökosystem



Netzwerkzugang

Service Software

Service trifft Vernetzung

Mit der Service-Software erhalten Sie direkten Zugriff auf Ihre Behandlungseinheit. Durch die Softwarelösung lässt sich der hygienische und technische Status der Einheit zu jederzeit überblicken und sie sorgt für ein gleichbleibend hohes Qualitätsniveau in der Hygienesdokumentation.

Mit einer registrierten Axano/Axano Pure erhalten Sie schnelle und unkomplizierte Hilfe im Servicefall. Verbessern Sie die Leistungsfähigkeit Ihrer Behandlungseinheit, indem Sie Ausfällen vorbeugen.




Mehrwert für Zahnarztpraxen

- Schneller Überblick über den Gerätestatus und Verwaltung von Benutzerprofilen
- Nächster Wartungstermin und Zugriff auf jüngste technische Dokumente
- Anzeige von Softwareversionen und Lizenzen
- Aufgezeichnete Hygienemaßnahmen mit Berichterstellung

Mehrwert für den Techniker

- Anzeige von Informationen zu den elektrischen Komponenten des Geräts
- Anzeige von Service-Speicher und Log-Dateien
- Gezielte Vorbereitung von Wartungsterminen
- Live-Zugriff auf die Behandlungseinheit bei Kundenanfragen

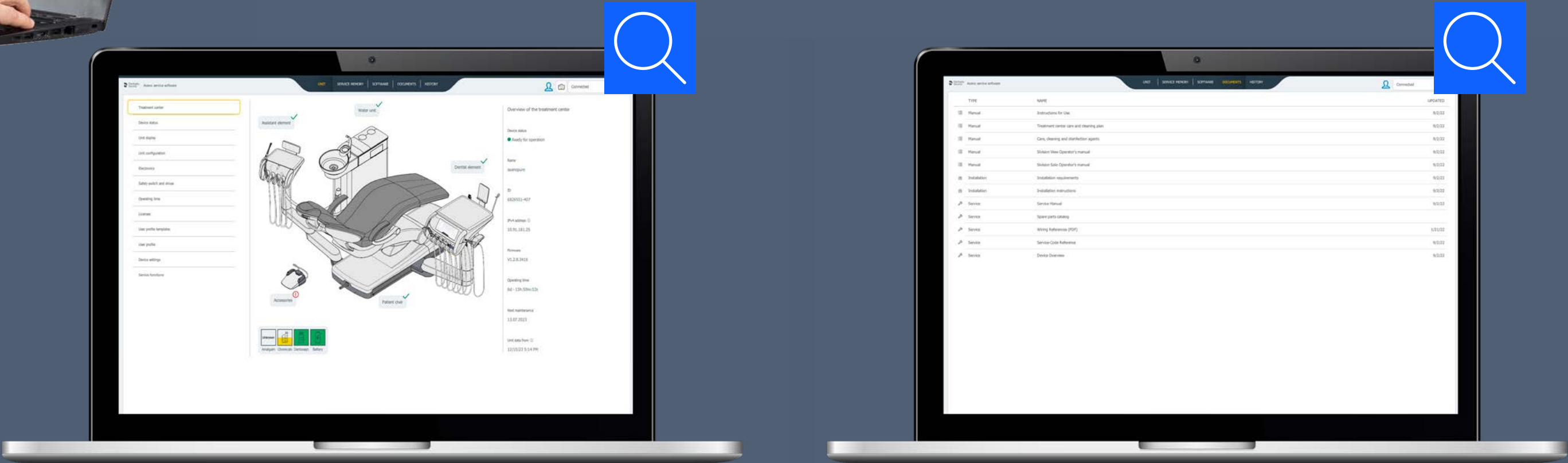




Netzwerkzugang


Ferndiagnose

- Es besteht die Möglichkeit, die Servicecodes der Behandlungseinheit auszulesen
- Dazu muss die Behandlungseinheit mit dem Praxisnetzwerk und dem Internet verbunden sein
- Der Servicetechniker kann über eine sichere Verbindung von jedem Standort aus auf die Servicecodes zugreifen
- So kann vor einem Vor-Ort-Einsatz eine Diagnose gestellt und ein schneller Service gewährleistet werden

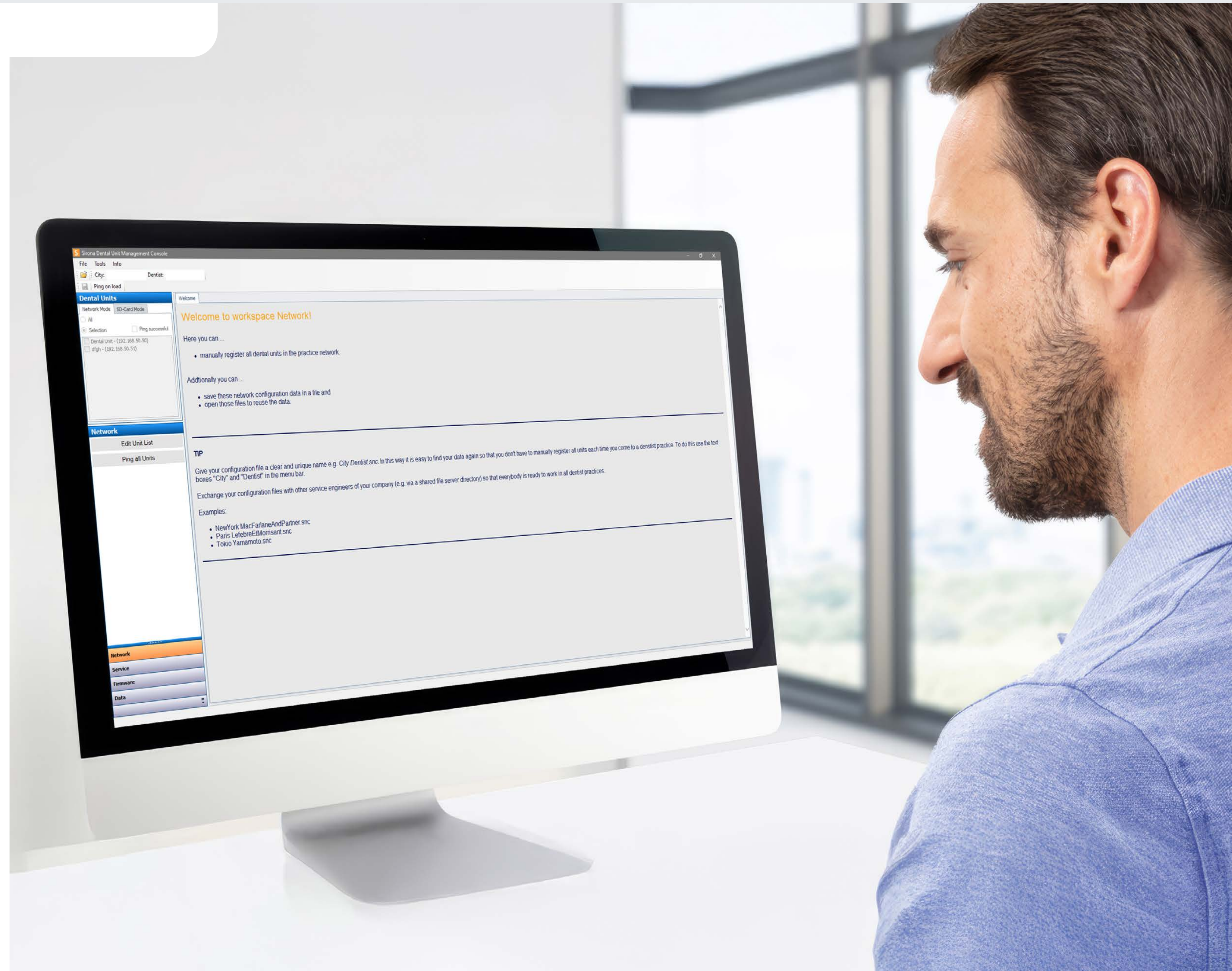

Infektionsprävention

- Integriertes Hygienesystem >
- Integrierte Desinfektionsanlage >
- Chemische Saugschlauchreinigung >
- Chemische Mundspülbeckenreinigung >
- Frischwasserflasche: Autarke Wasserversorgung >
- Hygiene-Cockpit >
- Glatte Oberflächen >

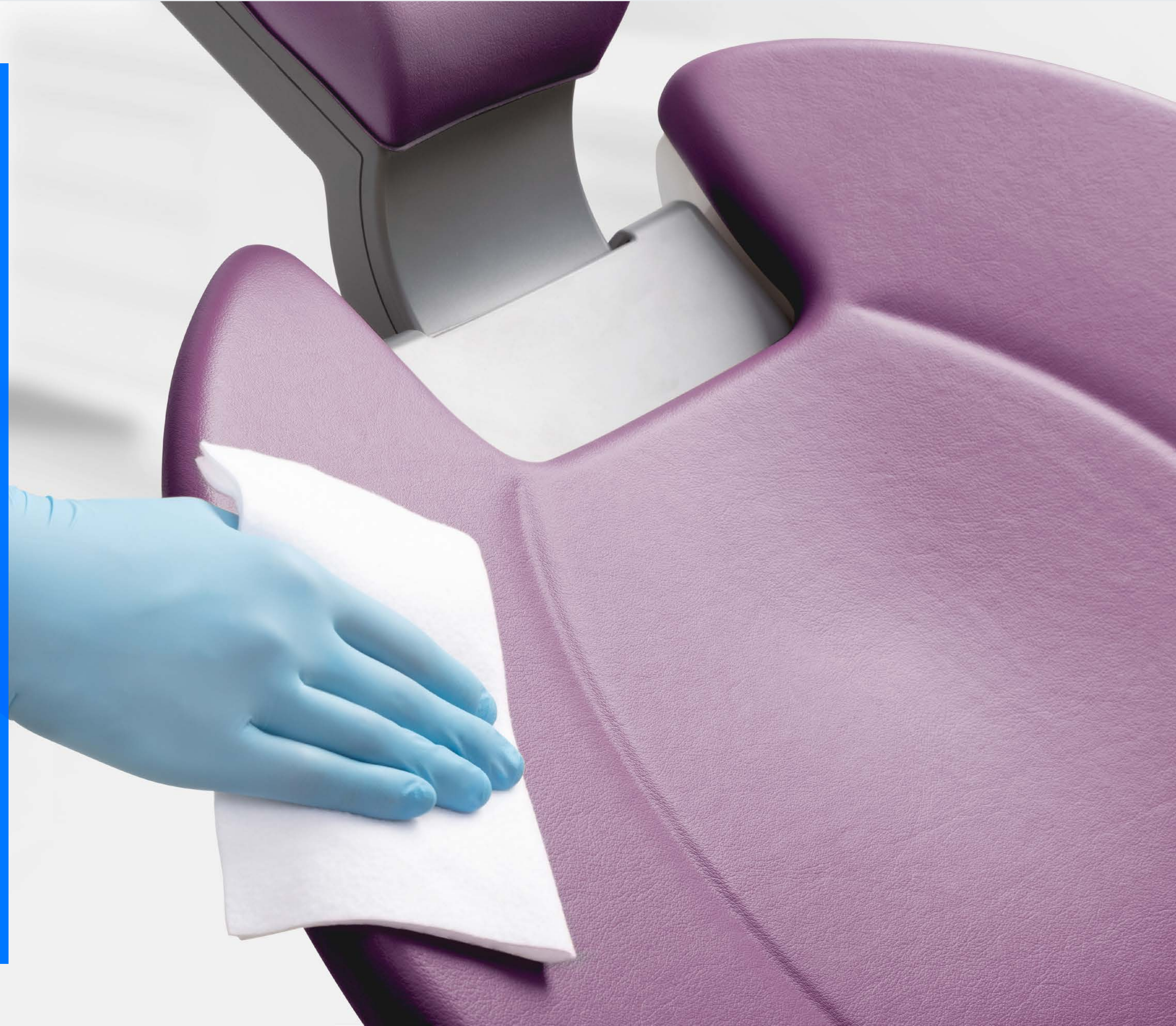



Infektionsprävention

Sicherheit leicht gemacht: Infektionskontrolle und Prävention

Ein effektives Hygienekonzept ist das Markenzeichen einer gut geführten Praxis und liegt den Patienten am Herzen. Um effektive, intuitive und schnelle Abläufe zu gewährleisten, sind Infektionskontrolle und -prävention Grundpfeiler jeder unserer Behandlungseinheiten.

Wir haben unsere Behandlungseinheiten mit intelligenten Hygienekonzepten ausgestattet, um Ihnen und Ihrem Praxisteam die Einhaltung der Hygienevorschriften und -richtlinien zu erleichtern.

Das integrierte Hygienesystem unterstützt das Praxisteam durch automatische Spül- und Reinigungsprozesse. Durch die handfreie Bedienung wird eine Kreuzkontamination von vornherein vermieden.

Infektionsprävention

Integriertes Hygienesystem

- ✓ Spülfunktion zum Spülen der Wasserwege nach jeder Behandlung
- ✓ Integrierte Sanieradapter zur Reinigung der Instrumentenschläuche; Sanieradapter sind herausnehmbar und thermisch aufbereitbar
- ✓ Automatische Spülfunktion zum Durchspülen der Wasserwege zu Beginn jedes Arbeitstages und am Abend
- ✓ Automatische Reinigung der Saugschläuche auf Knopfdruck
- ✓ Hochwertige Mundspülbecken aus Glas
- ✓ Bei Axano / Axano Pure mit automatischer chemischer Mundspülbeckenreinigung verfügbar



Infektionsprävention

Sicherheit und Effizienz auf Knopfdruck



Integrierte Desinfektionsanlage

- Dauerntkeimung aller Wasserwege mit Dento-sept Clean für eine langfristig gute Wasserqualität
- Monatliche Sanierung aller Wasserwege



Chemische Saugschlauchreinigung

- Automatische Dosierung des chemischen Reinigungsmittels für die Saugschlauchreinigung
- Reduzierung des täglichen Pflegeaufwands



Chemische Reinigung des Mundspülbeckens

- Die automatische Zugabe eines Reinigungsmittels bei jeder Spülung des Mundspülbeckens sorgt für verbesserte Hygiene und eine einfachere Reinigung, was die Wartung erleichtert
- Das Mundspülbecken kann ebenfalls in den Reinigungsprozess des Absaugschlauchs einbezogen werden

*Gleichzeitige Reinigung der Saugschläuche möglich

Infektionsprävention

Autarke Wasserversorgung durch Frischwasserflasche

- ✓ Kontrollierte Wasserqualität
- ✓ Kontinuierliche Desinfektion, Spülung und Sanierung möglich
- ✓ Ausführung ohne Umschaltung entspricht der EN1717 und des DVGW





Hygiene Cockpit

Geführte Hygieneprozesse: So können Sie wertvolle Zeit sparen.

Das Hygiene-Cockpit auf der Smart Touch zeigt an, welche Hygienemaßnahmen bald anstehen. Darüber hinaus können Sie automatische Hygienemaßnahmen für das regelmäßige Spülen und auch die monatliche Intensiventkeimung im Hygienecockpit starten. Zusätzlich zu Instrumentenschläuchen werden Saugschläuche und Mundspülbecken auf Knopfdruck automatisch mit Reinigungsmittel gespült.

Hygiene auf hohem Niveau: So einfach geht es

- Hygiene-Cockpit, um die jeweiligen Hygienemaßnahmen nachzuverfolgen
- Einfache Reinigung der Instrumentenschläuche mit Hilfe der integrierten Desinfektionsanlage
- Herausnehmbare Adapter zur einfachen Saugschlauchreinigung
- Alle hygienekritischen Elemente sind abnehmbar, sterilisierbar und/oder thermodesinfizierbar, um den Schutz vor Kreuzkontamination zu erhöhen.
- Nur bei Axano: Ambient Light unterstützt die Durchführung von Hygienemaßnahmen durch die Anzeige eines laufenden Prozesses. So kann das Praxisteam schon aus der Ferne den Status der Einheit erkennen, das spart Zeit und Weg.



Glatte Oberflächen


Pflegeleichte Oberflächen

Unsere Behandlungseinheiten sind ausschließlich mit langlebigen, leicht zu reinigenden Oberflächen ausgestattet. Die Kunststoffkomponenten sind leicht, robust sowie angenehm griffig und rutschfest.

Abnehmbare Elemente

Alle hygienekritischen Elemente sind abnehmbar, sterilisierbar und/oder thermodesinfizierbar



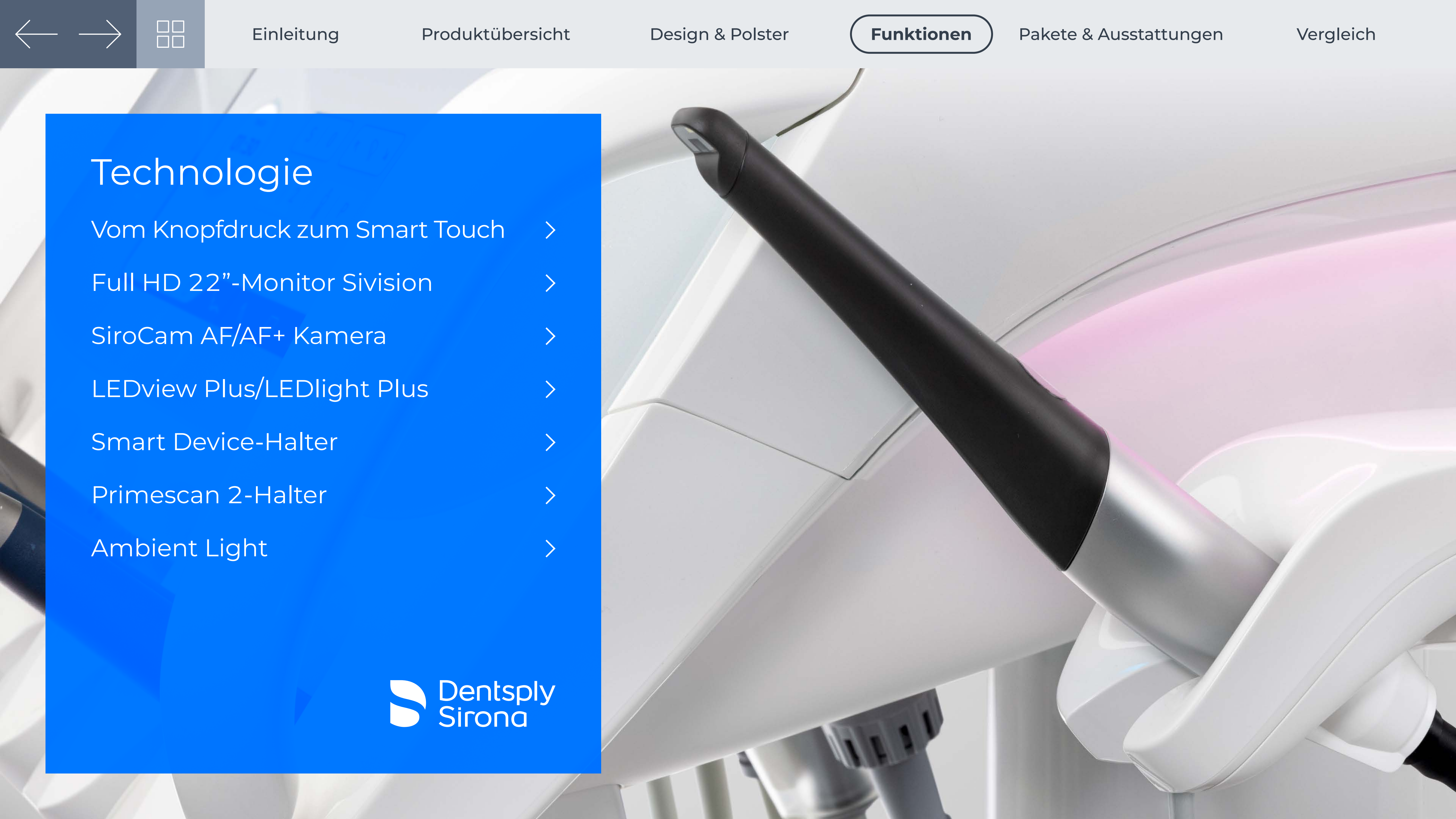

Technologie

- Vom Knopfdruck zum Smart Touch >
- Full HD 22"-Monitor Sivation >
- SiroCam AF/AF+ Kamera >
- LEDview Plus/LEDlight Plus >
- Smart Device-Halter >
- Primescan 2-Halter >
- Ambient Light >



Technologie

Spitzentechnologie für eine optimierte Versorgung

Wir möchten Sie dabei unterstützen, eine hochwertige zahnärztliche Versorgung in einer angenehmen und vertrauensvollen Atmosphäre anzubieten.

Technologische Fortschritte ermöglichen innovative Funktionen, die das Behandlungserlebnis für Sie und Ihre Patienten weiter verbessern. Eine intuitive Benutzeroberfläche lässt Sie effizient arbeiten.

Bedienoberfläche

Intuitive Bedienung: Benutzerfreundlichkeit der Extraklasse



Smart Touch

- Das große 10,3"-Smart Touch-Display ist komfortabel und lässt sich intuitiv bedienen
- Ausgestattet mit zahlreichen Optionen und lässt sich nach Ihren Bedürfnissen individualisieren
- Die hochwertige Glasoberfläche kann einfach und effizient gereinigt werden



Easy Touch

- Hoher Bedienkomfort dank intuitiver Touchscreen-Technologie
- Mehrfarbiges 4,3"-Display
- Mehrere Benutzerprofile
- Zusätzliche Bedien- und Anzeige-Optionen, z. B. integrierte Endo mit ApexLocator-Visualisierung



EasyPad

- Klare und intuitive Bedienung
- Mit fünffacher digitaler Ziffernanzeige, z. B. zur Anzeige von Messwerten oder Uhrzeit
- LED-Statusanzeige
- Bis zu 2 Benutzerprofile
- 3 Favoritentasten für individuell voreingestellte Geräteeinstellungen wie Geschwindigkeit und Spraymenge




Full HD 22" Monitor Sivation

Kommunikation trifft Vertrauen. Und Sie können die Bindung zu Ihren Patienten stärken.

Entspannte Beratung vor Ort mit klarer Visualisierung für Sie und Ihre Patienten.

Hilfreiche Tools unterstützen Sie in der Kommunikation mit Ihren Patienten und sorgen für Transparenz durch intraorale Bilder, Röntgenaufnahmen und andere Medien, die Sie direkt auf dem integrierten 22"-Sivation-Monitor anzeigen können.

- Entspannte Beratung direkt an der Behandlungseinheit
- Klare Visualisierung
- Vertrauensvolle Kommunikation
- Mehr Transparenz

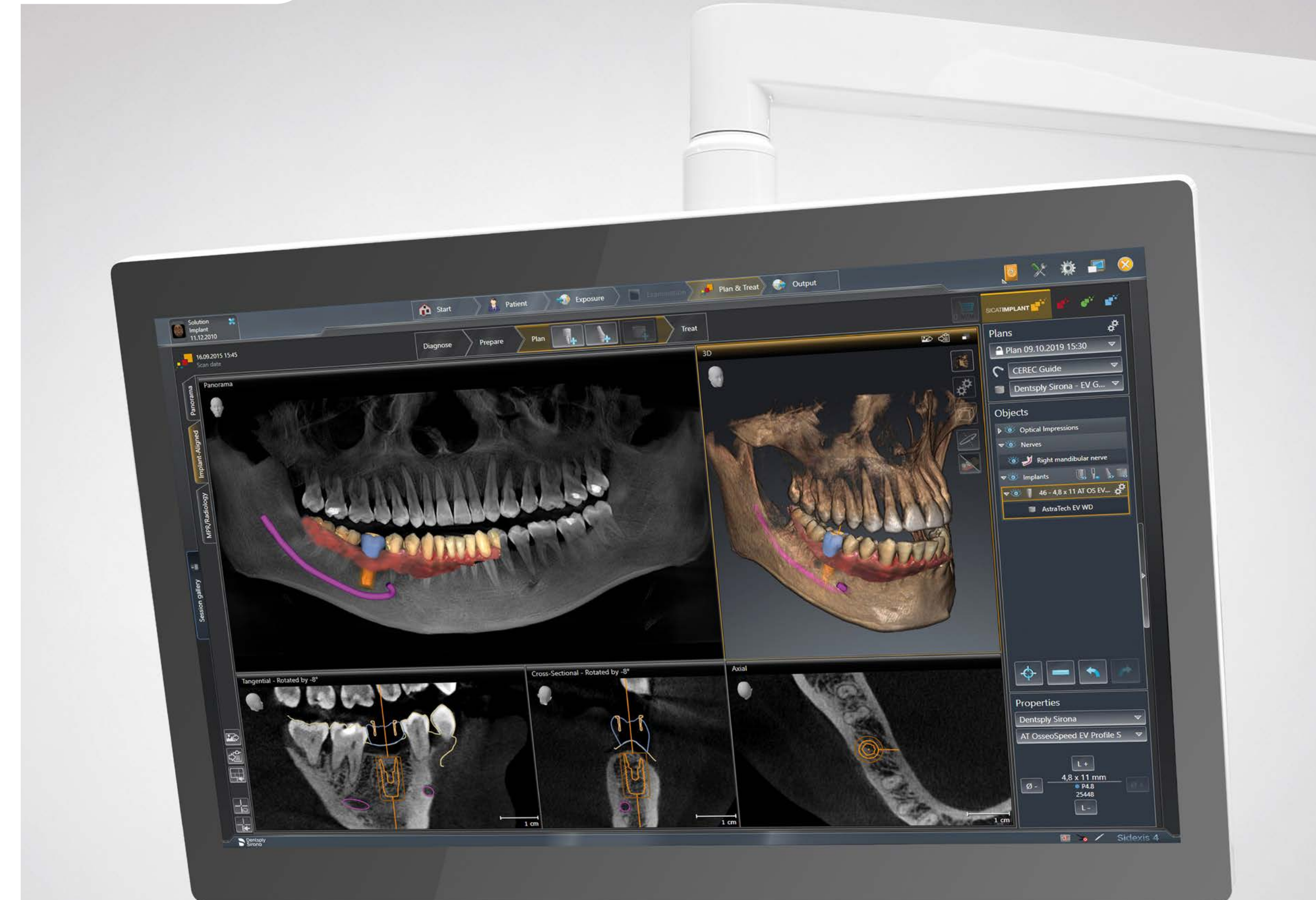

Kamera SiroCam

Hervorragende Bildqualität

Hochauflösende Bilder und exakte zahnmedizinische Dokumentation. Unsere Kameras liefern zuverlässige und gestochen scharfe Bilder für verschiedene zahnmedizinische Behandlungen und unterstützen so die Diagnose.



SiroCam AF+

SiroCam AF

Fokus	Autofokus	Autofokus
Bildformat 16:10	✓	✓
Pixels (nutzbar)	1.00 Megapixel	0.65 Megapixel
Fokusbereich	✓ (2–130 mm)	✓ (2–130 mm)
Auflösung Live-Bild	824 × 514	824 × 514
Auflösung Standbild	1276 × 796	1024 × 640



LEDview Plus / LEDlight Plus

Unterstützende Beleuchtung

Wir kombinieren moderne LED-Technologie mit ergonomischem Design, um ein optimales Gleichgewicht zwischen Helligkeit, Farbtemperatur und Lichtfeldgröße zu erzielen und so eine vollständige Ausleuchtung der Mundhöhle für eine hervorragende Patientenversorgung zu gewährleisten. Ein berührungsloser Sensor, eine automatische Abschaltung und abnehmbare Handgriffe reduzieren das Risiko einer Kreuzkontamination.



LEDview Plus

- 200 × 100 mm Lichtfeld
- Hoher CRI dank mehrfarbiger LEDs
- Hohe Lichtintensität, in 7 Stufen einstellbar (5.000 bis 40.000 Lux)
- Einstellbare Farbtemperatur (4.400 – 6.200 K)
- Echter Komposit-Modus (ISO 9680:2014-konform)
- Berührungsloser Sensor
- Auch als Deckenleuchte und Deckenkombination mit Heliodent Plus erhältlich



LEDlight Plus

- 160 × 80 mm Lichtfeld
- Bis zu 30.000 Lux Beleuchtung in 5 Stufen einstellbar
- Echter Komposit-Modus (ISO 9680:2014-konform)
- Berührungsloser Sensor

Smart Device-Halter

Smart Device-Halter

- ✓ Integrieren Sie das Praxistablet ganz einfach in Ihre Behandlung
- ✓ Magnetische Halterung für Praxistablet
- ✓ Erleichtern Sie die effektive Kommunikation mit Ihren Patienten über DS Core



Primescan 2-Halter

Primescan 2-Halter

- ✓ Für mehr Stabilität und Sicherheit
- ✓ Primescan 2 bleibt während der Behandlung des Patienten in Reichweite.
- ✓ Sichere Ablage des Scanners, wenn er nicht gebraucht wird.
- ✓ Einfacher und ergonomischer Workflow





Einleitung

Produktübersicht

Design & Polster

Funktionen

Pakete & Ausstattungen

Vergleich

Ambient Light

Ambient Light

- ✓ Schöner Farbakzent
- ✓ Schafft eine angenehme Ambiente
- ✓ Visualisiert laufende Hygieneprozesse
- ✓ Mit individualisierbaren Farbeinstellungen



Pakete & Optionen

Axano >

Axano Pure >

Sinius >

Intego Pro >

Intego >



Axano

Anwenderpaket

Praxis



- 2x Elektromotor BL ISO F
- Turbinenschlauch
- Ultraschallhandstück SiroSonic TL
- Behandlungsleuchte LEDview Plus
- Bis zu 2 Arbeitsstühle zum Paket-Vorteilspreis


Optionspakete

Endo




- Endodontie-Funktion inkl. reziproke Feilensysteme
- Apex-Locator
- Winkelstück T1 Line Endo 6 L mit Licht

Implant

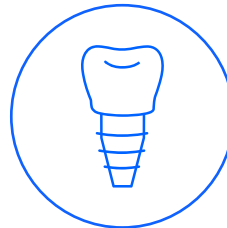

- Implantologie-Funktion
- Pumpe für physiologische Kochsalzlösung
- Elektromotor BL Implant E mit Licht
- Winkelstück Implant 20 : 1 mit Licht

Sivision

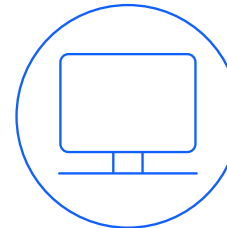

- Kameraversorgung im Arztelement
- SiroCam AF+
- 22"-Sivision-Monitor
- Leuchtaufbaustange mit Adapter für Monitor (Tray für Monitoradaption)

Axano

Ihre Einzeloptionen (1)

● = in der Basiseinheit enthalten
○ = optional

Arztelement (mit Smart Touch, Griffe und Instrumentenablage abnehmbar)	
Smart Delivery Pro die motorische Verschiebebahn mit motorischer Höhenverstellung	●
Sprayvit mit Licht	○
1. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	●
2. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	●
3. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	●
4. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	○
Elektromotor BL ISO F (Drehzahl von 90-40.000 U/min)	○
Turbinenschlauch	○
Ultraschallhandstück SiroSonic TL	○
Implantologie-Funktion	○
Integrierte Pumpe für Kochsalzlösung	○
Elektromotor BL Implant E mit Licht	○
Winkelstück Implant 20 : 1 mit Licht	○
Endodontie-Funktion inkl. reziproke Feilensysteme und Feilendatenbank	○
Apex-Locator	○
Winkelstück T1 Line Endo 6 L mit Licht	○
USB-Schnittstelle	●
Handfreie Bedienung mit Cursorsteuerung	●
Smart Device-Halter für Tablet	○
Panorama-Röntgenbildbetrachter	○
Primescan 2-Halter	○

Patientenstuhl	
Patientenspezifische Stuhlpositionen	●
Motorische Kopfstütze mit patientenindividueller Kopfstützenautomatik*	●
Ambient Light	●
Klima-Premium-Polster	●
Lounge-Polster, auf Wunsch mit farbiger Ziernaht	○
Lordose-/Massagefunktion	●
Armlehne, rechts schwenkbar	○
Armlehne links	○
Kreuzfußschalter	●
Funk-Fußschalter Smart Control (wahlweise Funk-Fußschalter Classic)	●
Fremdgeräte-Anschluss	○
Sitzauflage für kleine Patienten	○
ErgoMotion	●
Einstellbare Verfahrensgeschwindigkeit	●

* Mit Sidexis 4 verfügbar

Axano

Ihre Einzeloptionen (2)

● = in der Basiseinheit enthalten
○ = optional

Assistenzelement (mit Touch-Display, abnehmbare Ablage)	
Sprayvit mit Licht	○
Absaugvorrichtung	●
Speichelzieher	●
Chirurgische Absaugung	○
2. großer Sauger	○
Ablageschale für Polymerisationslicht SmartLite Pro	○
Medizinischer 12V-Anschluss	○
Wassereinheit	
Hygienesystem mit entnehmbaren Reinigungseinschüben und Autopurge-Funktion	●
Desinfektionsanlage mit Dauerentkeimung und Sanierfunktion	●
Chemische Saugschlauch- und Mundspülbeckenreinigung	●
Mundspülbeckenventil für Nassabsaugung	●
Separierautomatik	○
Amalgamabscheider	○
Motorisch schwenkbares Mundspülbecken aus Glas, abnehmbar	●
Aqua-Funktion (autarke Wasserversorgung)	●

Patientenkommunikation	
SiroCam AF+	○
22"-Sivision-Monitor, am Tray inkl. Tray	○
22"-Sivision-Monitor, an Leuchtenaufbaustange	○
Kameraversorgung im Arztelement	○
Kabelsatz für PC-Anbindung	○
Arbeitsstühle (lange oder kurze Gasfeder wählbar)	
Hugo Freehand (mit Fußauslösung)	○
Hugo Manual (mit Handauslösung)	○
Hugo Manual Plus (mit Handauslösung und Fußring)	○
Theo mit Sattelsitz	○
Carl Manual (mit Handauslösung)	○
Carl Manual Plus (mit Handauslösung und Fußring)	○

Axano

Ihre Einzeloptionen (3)

● = in der Basiseinheit enthalten
○ = optional

Weitere Optionen	
Sirona Tray für Verschiebebahn	○
LEDview Plus Gerätemodell	○
LEDview Plus Deckenmodell	○
Adapter für Heliodent Plus /LEDview Plus Deckenkombination	○
Adapter für Heliodent Plus Gerätemodell	○
Patientenspiegel	○
Kamerahalter an der Leuchte	○




Die Verfügbarkeit von Optionen und Funktionen kann je nach Land variieren.



Axano Pure


Anwenderpakete

Essential

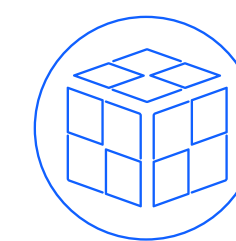

- 1x Elektromotor BL ISO F
- Turbinenschlauch
- 1x Sprayvit (Arztelement)
- SiroSonic TL Ultraschallhandstück
- Behandlungsleuchte LEDview Plus
- Bis zu 2 Arbeitsstühle zum Paket-Vorteilspreis

Praxis

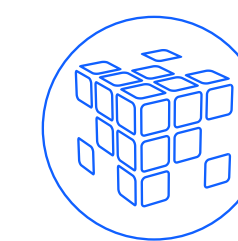

- 2x Elektromotor BL ISO F
- Turbinenschlauch
- 3. Bohrantrieb
- 2x Sprayvit (Arzt- und Assistenzelement)
- SiroSonic TL Ultraschallhandstück
- Behandlungsleuchte LEDview Plus
- Bis zu 2 Arbeitsstühle zum Paket-Vorteilspreis



Axano Pure


Optionspakete

Endo
im Basisgerät enthalten



- Endodontie-Funktion inklusive reziproken Feilensystemen
- ApexLocator
- T1 Line Endo 6L Winkelstück mit Licht


- Comfort**
- Motorische Kopfstütze
 - Lordosefunktion
 - Klima-Premiumpolster
 - Motorisch schwenkbares Mundspülbecken

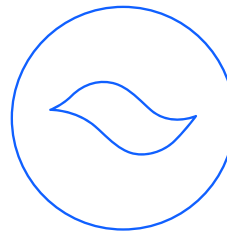

- Implant**
- Implantologie-Funktion
 - Elektromotor BL Implant E mit Licht
 - Pumpe für physiologische Kochsalzlösung
 - Implant-Winkelstück 20:1



- Sivision**
- Kameraversorgung im Arztelement
 - SiroCam AF (SiroCam AF+ gegen Aufpreis)
 - 22"-Sivision-Monitor
 - Monitorposition an der Leuchtenaufbaustange (Mehrpreis für Monitor am Tray)

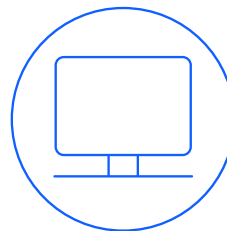

Axano Pure

Ihre Einzeloptionen (1)

● = in der Basiseinheit enthalten
○ = optional

Arztelement (mit Smart Touch, Griffe und Instrumentenablage abnehmbar)	
Mit manueller Verschiebebahn	●
Sprayvit mit Licht	○
1. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	●
2. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	●
3. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	○
Elektromotor BL ISO F (Drehzahl 90-40.000 U/min)	○
Turbinenschlauch	○
SiroSonic TL Ultraschallhandstück	○
Implantologie-Funktion	○
Elektromotor BL Implant E mit Licht	○
Winkelstück Implant 20:1 mit Licht	○
Integrierte Pumpe für Kochsalzlösung	○
Endo-Funktion inkl. reziproken Feilensystemen	●
ApexLocator mit Anzeige auf Sivation-Monitor	●
Winkelstück T1 Line Endo 6 L mit Licht	●
USB-Schnittstelle	○
Handfreie Bedienung mit Cursorsteuerung	●
Smart Device-Halter für Tablet	○
Panorama-Röntgenbildbetrachter	○
Primescan 2-Halter	○

Patientenstuhl	
Doppelgelenk-Kopfstütze	●
Motorische Kopfstütze	○
Premium-Polster	●
Klima-Premium-Polster	○
Lounge-Polster, auf Wunsch mit farbigen Kontrastnaht	○
Lordosefunktion	○
Schwenkbare Armlehne, rechts	○
Armlehne, links	○
Kreuzfußschalter	●
Smart Control Funk-Fußschalter (wahlweise Funk-Fußschalter Classic)	●
Fremdgeräte-Anschluss	○
Sitzauflage für kleine Patienten	○
ErgoMotion	●

Axano Pure

Ihre Einzeloptionen (2)

● = in der Basiseinheit enthalten
○ = optional

Assistenzelement (mit Touch-Display, 4 Positionen, abnehmbare Ablage)	
Sprayvit mit Licht	○
Absaugvorrichtung	●
Speichelsauger	●
Chirurgische Saugvorrichtung	○
2. großer Sauger	○
Ablageschale für SmartLite Pro Lampe	○
Medizinischer 12V-Anschluss	○
Wassereinheit	
Hygiene System mit entnehmbaren Reinigungseinschüben und Autopurge-Funktionen	●
Desinfektionsanlage mit Dauerentkeimung und Sanierfunktion	●
Chemische Saugschlauch- und Mundspülbeckenreinigung	●
Mundspülbeckenventil für Nassabsaugung	●
Separierautomatik	○
Amalgamabscheider	○
Motorisch schwenkbares Mundspülbecken aus Glas, abnehmbar	○
Aqua-Funktion (autarke Wasserversorgung)	●

Patientenkommunikation	
SiroCam AF/AF+	○
22" Sivation Monitor am Tray inkl. Tray	○
22" Sivation Monitor an Leuchtenaufbaustange	○
Kameraversorgung im Arztelement	○
Kabelsatz für PC-Anbindung	○
Arbeitsstühle (lange oder kurze Gasfeder wählbar)	
Hugo Freehand (mit Fußauslösung)	○
Hugo Manual (mit Handauslösung)	○
Hugo Manual Plus (mit Handauslösung und Fußring)	○
Theo mit Sattelsitz	○
Carl Manual (mit manueller Steuerung)	○
Carl Manual Plus (mit Handauslösung und Fußring)	○

Axano Pure

Ihre Einzeloptionen (3)

● = in der Basiseinheit enthalten
○ = optional

Weitere Optionen	
Sirona Tray	○
LEDview Plus Gerätemodell	○
LEDview Plus Deckenmodell	○
Adapter für Heliodent Plus/LEDview Plus Decken-Kombinationen	○
Adapter für Heliodent Plus Gerätemodell	○
Patientenspiegel	○
Kamerahalterung an der Leuchte	○

Die Verfügbarkeit von Optionen und Funktionen kann je nach Land variieren.






Sinius


Anwenderpakete

Advance

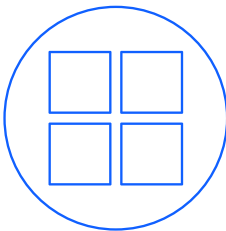

- Smart Control mit kabellosem Fußschalter
- Sprayvit M im Arztelement
- 1x Elektromotor BL ISO C
- Ultraschallhandstück Sirosonic TL
- LEDview Plus
- Bis zu 2 Arbeitsstühle zum Paket-Vorteilspreis

Innovation

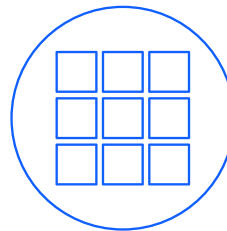

- Smart Control mit kabellosem Fußschalter
- Sprayvit M im Arzt- und Assistenzelement
- 2x Elektromotor BL ISO C)
- Ultraschallhandstück Sirosonic TL
- LEDview Plus
- Bis zu 2 Arbeitsstühle zum Paket-Vorteilspreis



Sinius


Optionspakete

Endo




- Endodontiefunktion inkl. Funktion reziproke Feilensysteme
- ApexLocator
- Winkelstück T1 Line Endo 6L mit Licht

Comfort

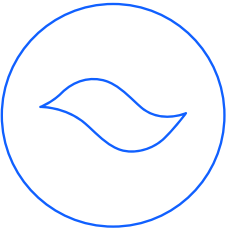


- Motorische Kopfstütze
- Motorisches Mundspülbecken
- Lordosefunktion
- Klima-Premium-Polster

Implant

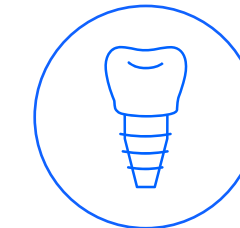

- Implantologiefunktion
- Integrierte Pumpe für physiologische Kochsalzlösung
- Elektromotor BL Implant
- Winkelstück Implant 20 : 1

Sivision

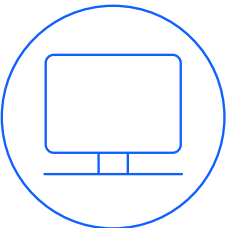

- Sivision ready mit USB-Schnittstelle
- Kameraversorgung im Arztelement
- SiroCam AF (SiroCam AF+ gegen Aufpreis)
- 22"-Sivision-Monitor
- Monitorposition an der Leuchtaufbaustange (Mehrpreis für Monitor am Tray)

Sinius

Ihre Einzeloptionen (1)

= in der Basiseinheit enthalten

= optional

Arztelement (mit EasyTouch, Griffe und Instrumentenablage abnehmbar)	
Sprayvit M mit Licht	
1. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)www	
2. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	
3. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	
Elektromotor BL ISO C (Drehzahl 90 bis 40.000 U/min)	
Turbinenschlauch	
Ultraschallhandstück SiroSonic TL	
Endodontie-Funktion mit Feilendatenbank	
Funktion reziproke Feilensysteme	
Apex Locator	
Winkelstück T1 Line Endo 6L mit Licht	
Implantologie-Funktion	
Elektromotor BL Implant E mit Licht	
Winkelstück Implant 20 : 1 mit Licht	
Integrierte Pumpe für Kochsalzlösung	
Handfreie Bedienung mit Cursorsteuerung	
Schwenkbarer Tray-Halter für 1 (Sinius CS) oder 2 (Sinius CS, TS) Normtrays	
Panorama-Röntgenbildbetrachter	
Zusätzlicher Kamera-Halter	

Patientenstuhl	
Fußschalter Classic, kabelgebunden	
Funk-Fußschalter Smart Control	
Funk-Fußschalter Classic	
Doppelgelenk-Kopfstütze	
Motorische Kopfstütze	
Premium-Polster	
Klima-Premium-Polster	
Lounge Polster, auf Wunsch mit farbiger Ziernaht	
ErgoMotion	
Lordosefunktion	
Armlehne, rechts schwenkbar	
Armlehne, links	
Kreuzfußschalter	
Fremdgeräteanschluss	
Sitzauflage für kleine Patienten	

Sinius

Ihre Einzeloptionen (2)

● = in der Basiseinheit enthalten

○ = optional

Assistenzelement (mit Touch-Display, abnehmbare Ablage)	
Sprayvit mit Licht	○
Absaugvorrichtung	●
Speichelzieher	●
Chirurgische Absaugung	○
2. großer Sauger	○
Ablageschale für Polymerisationslicht SmartLite Pro	○
Wassereinheit	
Hygiene System mit entnehmbaren Reinigungseinschüben	●
Desinfektionsanlage mit Dauerentkeimung und Sanierfunktion, Purge und Autopurge	●
Chemische Saugschlauch- und Mundspülbeckenreinigung	●
Mundspülbeckenventil für Nassabsaugung	○
Separierautomatik	○
Amalgamabscheider	○
Manuell schwenkbares Mundspülbecken aus Glas, abnehmbar	●
Motorisch schwenkbares Mundspülbecken aus Glas, abnehmbar	○
Aqua-Funktion (autarke Wasserversorgung)	●

Patientenkommunikation	
SiroCam AF/AF+	○
22"-Sivision-Monitor, am Tray inkl. Tray	○
22"-Sivision-Monitor, an Leuchtenaufbaustange	○
Kameraversorgung im Arztelement	○
Kabelsatz für PC-Anbindung	○
Arbeitsstühle (lange oder kurze Gasfeder wählbar)	
Hugo Freehand (mit Fußauslösung)	○
Hugo Manual (mit Handauslösung)	○
Hugo Manual Plus (mit Handauslösung und Fußring)	○
Theo mit Sattelsitz	○
Carl Manual (mit manueller Steuerung)	○
Carl Manual Plus (mit Handauslösung und Fußring)	○

Sinius

Ihre Einzeloptionen (3)

● = in der Basiseinheit enthalten

○ = optional

Weitere Optionen	
Sirona Tray für Verschiebebahn	○
LEDview Plus Gerätemodell	○
LEDview Plus Deckenmodell	○
Adapter für Heliodent Plus / LEDview Plus Deckenkombination	○
Adapter für Heliodent Plus Gerätemodell	○
Patientenspiegel für LEDview Plus	○
Kamerahalter an der Leuchte	○

Die Verfügbarkeit von Optionen und Funktionen kann je nach Land variieren.






Intego Pro

Anwenderpakete


Plus

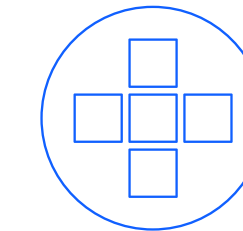

- Doppelgelenk-Kopfstütze
- Elektronischer Fußschalter
- Bedienpaneel EasyTouch
- Sprayvit E für das Arztelement
- Einbausatz 3. Bohrantrieb
- 2× Elektromotor BL ISO E
- 1× Turbinenschlauch mit Licht
- Ultraschallhandstück SiroSonic L
- Bedienpaneel für Assistenz-element
- Sprayvit E für das Assistenz-element
- Chemische Saugschlauch-reinigung
- LEDview Plus

^ Aufpreis für Funk-Fußschalter

Prophylaxe

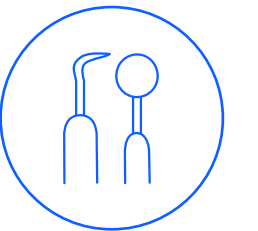

- Doppelgelenk-Kopfstütze
- Fremdgeräteanschluss
- Sprayvit E für das Arztelement
- 1× Elektromotor BL ISO E
- 1× Turbinenschlauch mit Licht
- SiroSonic L Ultraschallhandstück
- SiroPerio PE 1
- LEDview Plus

KFO



- Flacher Kopfstütze
- Sprayvit E für das Arztelement
- 1× Elektromotor BL ISO E
- Ultraschallhandstück SiroSonic L
- LEDview Plus



Intego Pro & Intego Pro Ambidextrous


Optionspakete

Endo Pro



- Endodontiefunktion inkl.
- Funktion reziproke Feilensysteme
- Apex-Locator
- Winkelstück Endo 6:1


Sivision ready

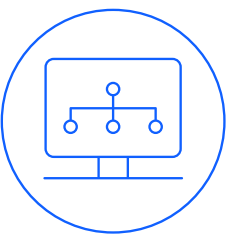

Für Arztelement oder
Assistenzelement:

- USB Schnittstelle
- Netzwerk-Schnittstelle

Sivision Advance

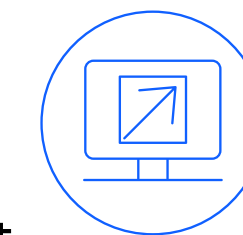

Für Kamera im Arztelement
oder Assistenzelement:

- Sivision Ready
- SiroCam AF
- Monitoradaption an der
Leuchtaufbaustange
- 22"-Sivision-Monitor

^ Aufpreis für SiroCam AF+

Intego Pro

Ihre Einzeloptionen (1)

● = in der Basiseinheit enthalten
○ = optional

Arztelement (für TS und CS verfügbar)	
EasyPad-Folientastatur für 2 Behandler programmierbar	●
EasyTouch programmierbarer TouchScreen für 4 Behandler programmierbar	○
Höhenverstellbarer Tragarm, pneumatisch gebremst	●
5 Instrumentenpositionen	●
Versorgung für 2 Bohrantriebe mit Lichtversorgung	●
Sprayvit E mit Licht	○
Turbinenschlauch mit Licht	○
1. Elektromotor BL ISO E mit Schlauch	○
2. Elektromotor BL ISO E mit Schlauch	○

Arztelement (für TS und CS verfügbar)	
Ultraschallhandstück SiroSonic L	○
3. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	○
Polylicht Saletec Mini LED	○
Endodontie-Funktion	○
Apex-Locator	○
Winkelstück Endo 6:1	○
Intraoral-Röntgenbildbetrachter	○
Zusatztray CS für 1 Normtray	○
Zusatztray TS/CS für 2 Normtrays	○
Silikonmatte für Assistenzelement Komfort	○
Abnehmbare Griffüberzüge für Arztelement	○
Zusatzablage für Kamera bei Version TS	○

Intego Pro

Ihre Einzeloptionen (2)

● = in der Basiseinheit enthalten
○ = optional

Patientenstuhl	
2 Behandlungspositionen, S- und O-Position	●
Pneumatischer Fußschalter	●
Elektronischer Fußschalter	○
Elektronischer Funkfußschalter	○
Hubsystem bis 185 kg	●
Flache Kopfstütze	●
Doppelgelenk-Kopfstütze	○
Premium-Polster	●
Lounge-Polster	○
Sitztaufledge für kleine Patienten	○
Armlehne, rechts	○
Armlehne, links	○
Fremdgeräteanschluss	○
Überflur-Montagekit	○
Zentraler Anschlusskasten	●
Adapterplatte	○
Adapterplatte Turn	○

Assistenzelement	
Version Komfort, an schwenkbarem Tragarm, ideal für Alleinbehandlung	●
Version Kompakt, nur in Kombination mit Option Turn	●
4 Instrumentenpositionen	●
Speichelzieher und Absaugvorrichtung	●
Sprayvit E mit Licht	○
2. Absaugvorrichtung	○
Polylicht Satelec Mini LED	○
Bedienpaneel	○
Silikonmatte für Assistenzelement Komfort	○

Patientenkommunikation	
USB-Schnittstelle im Arzt-oder Assistenzelement	○
SiroCam AF	○
SiroCam AF+ (gegen Aufpreis im Paket)	○
Monitoradaption an der Leuchtaufbaustange	○
22"-Sivision-Monitor	○
Netzwerk-Schnittstelle	○

Intego

Ihre Einzeloptionen (3)

● = in der Basiseinheit enthalten

○ = optional

Wassereinheit	
Desinfektionsanlage mit Dauerentkeimung und Sanierfunktion	●
Hygiene System mit entnehmbaren Reinigungseinschüben und Autopurge-Funktion	●
Schwenkbares Mundspülbecken Glas	●
Schwenkbares Mundspülbecken weiß	○
Separierautomatik	○
Amalgamabscheider Mundspülbeckenventil für Nassabsaugung	○
Mundspülbeckenventil für Nassabsaugung	●
Wasserheizer	●
Automatische Saugschlauchreinigung mit Wasser	●
Automatische Saugschlauchreinigung mit Chemie	○

Optionen Turn	
für Links- und Rechtshänder konvertierbar	○

Arbeitsstühle (lange oder kurze Gasfeder wählbar)	
Hugo Freehand (mit Fußauslösung)	○
Hugo Manual (mit Handauslösung)	○
Hugo Manual Plus (mit Handauslösung und Fußring)	○
Theo mit Sattelsitz	○
Carl Manual (mit Handauslösung)	○
Carl Manual Plus (mit Handauslösung und Fußring)	○

Optionen für Behandlungsleuchten	
LEDlight Plus	○
LEDview Plus Gerätemodell	○
LEDview Plus Deckenmodell	○
Adapter für Heliodent Plus / LEDview Plus Deckenkombination	○
Adapter für Heliodent Plus Gerätemodell	○
Patientenspiegel	○
Kamerahalterung an der Leuchte	○



Intego

Standardkonfiguration

Patientenstuhl

- Premium-Polster
- Elektronischer Multifunktions-Fußschalter
- Doppelgelenk-Kopfstütze
- Kreuzfußschalter
- Netzwerkschnittstelle

Arztelement

- Arztelement TS oder CS
- 5 Instrumentenpositionen
- EasyTouch-Bedienoberfläche
- Versorgung für zwei Bohrantriebe
- USB-Schnittstelle
- 1 Sprayvit E
- 1 Turbinenschlauch
- 1 Elektromotor BL ISO E
- 1 Ultraschallhandstück SiroSonic L

Behandlungsleuchte

- LEDlight Plus

Wassereinheit

- Frischwasserflasche mit DVGW Zulassung
- Wasserheizer
- Integrierte Purge- und Sanierfunktion
- Integrierte Saugschlauchreinigung mit Wasser
- Manuell schwenkbares Mundspülbecken
- Mundspülbeckenventil für Nassabsaugung

Assistenzelement

- Komfort, an schwenkbarem Tragarm (Kompakt für Turn-Variante)
- 4 Instrumentenablagen
- Bedienelement
- 1 Speichelzieher
- 1 Absaugvorrichtung

Intego

Ihre Einzeloptionen (1)

= in der Basiseinheit enthalten

= optional

Arztelement (für TS und CS verfügbar)	
Höhenverstellbarer Tragarm, pneumatisch gebremst	
5 Instrumentenpositionen	
Versorgung für 2 Bohrantriebe mit Lichtversorgung	
EasyTouch programmierbarer TouchScreen für 4 Behandler programmierbar	
Sprayvit E mit Licht	
Turbinenschlauch mit Licht	
Motor BL ISO E (Drehzahl von 1.000 bis 40.000 U/min)	
Ultraschallhandstück SiroSonic L	
2. Elektromotor BL ISO E (Drehzahl von 1.000 bis 40.000 U/min)	
3. Bohrantrieb (für Motor oder Turbine)	
2. Turbinenschlauch für Licht	
USB-Schnittstelle	
Zusatztray TS/CS für 2 Normtrays	
Zusatztray CS für 1 Normtray	
Silikonmatte für Arztelement TS/CS	
Abnehmbare Griffüberzüge für Arztelement	

Assistenzelement (für TS und CS verfügbar)	
4 Instrumentenpositionen	
Version Komfort, an schwenkbarem Tragarm, ideal für Alleinbehandlung	
Version Kompakt, nur in Kombination mit Option Turn	
Speichelzieher und Absaugvorrichtung	
Bedienelement	
Sprayvit E mit Licht	

Patientenstuhl (für TS und CS verfügbar)	
2 Behandlungspositionen, S- und 0-Position	
Doppelgelenk-Kopfstütze	
Premium-Polster	
Lounge-Polster	
Elektronischer Multifunktions-Fußschalter	
Kreuzfußschalter	
Armlehne, links	
Armlehne, rechts	
Fremdgeräteanschluss	
Adapterplatte Intego	
Hubsystem bis 185 kg	
Zentraler Anschlusskasten	
Netzwerkschnittstelle	

Intego

Ihre Einzeloptionen (2)

= in der Basiseinheit enthalten


= optional

Wassereinheit	
Anschluss für Frischwasserflasche mit DVGW Zulassung	
Wasserheizer	
Manuell schwenkbares Mundspülbecken	
Integrierte Purge- und Sanierfunktion	
Integrierte Saugschlauchreinigung mit Wasser	
Mundspülbeckenventil für Nassabsaugung	
Separierautomatik	
Amalgamabscheider	

Option Turn	
für Links- und Rechtshänder konvertierbar	

Behandlungsleuchten	
LEDlight Plus	
LEDview Plus	
Griffe für LEDlight Plus	
Griffhülsen für LEDview	
Patientenspiegel für LEDview Plus	
Kamerahalterung für LEDview Plus	

Arbeitsstühle (optional kurze oder lange Gasfeder)	
Hugo Freehand (mit Fußauslösung)	
Hugo Manual (mit Handauslösung)	
Hugo Manual Plus (mit Handauslösung und Fußring)	
Theo mit Sattelsitz	
Carl Manual (mit Handauslösung)	
Carl Manual Plus (mit Handauslösung und Fußring)	

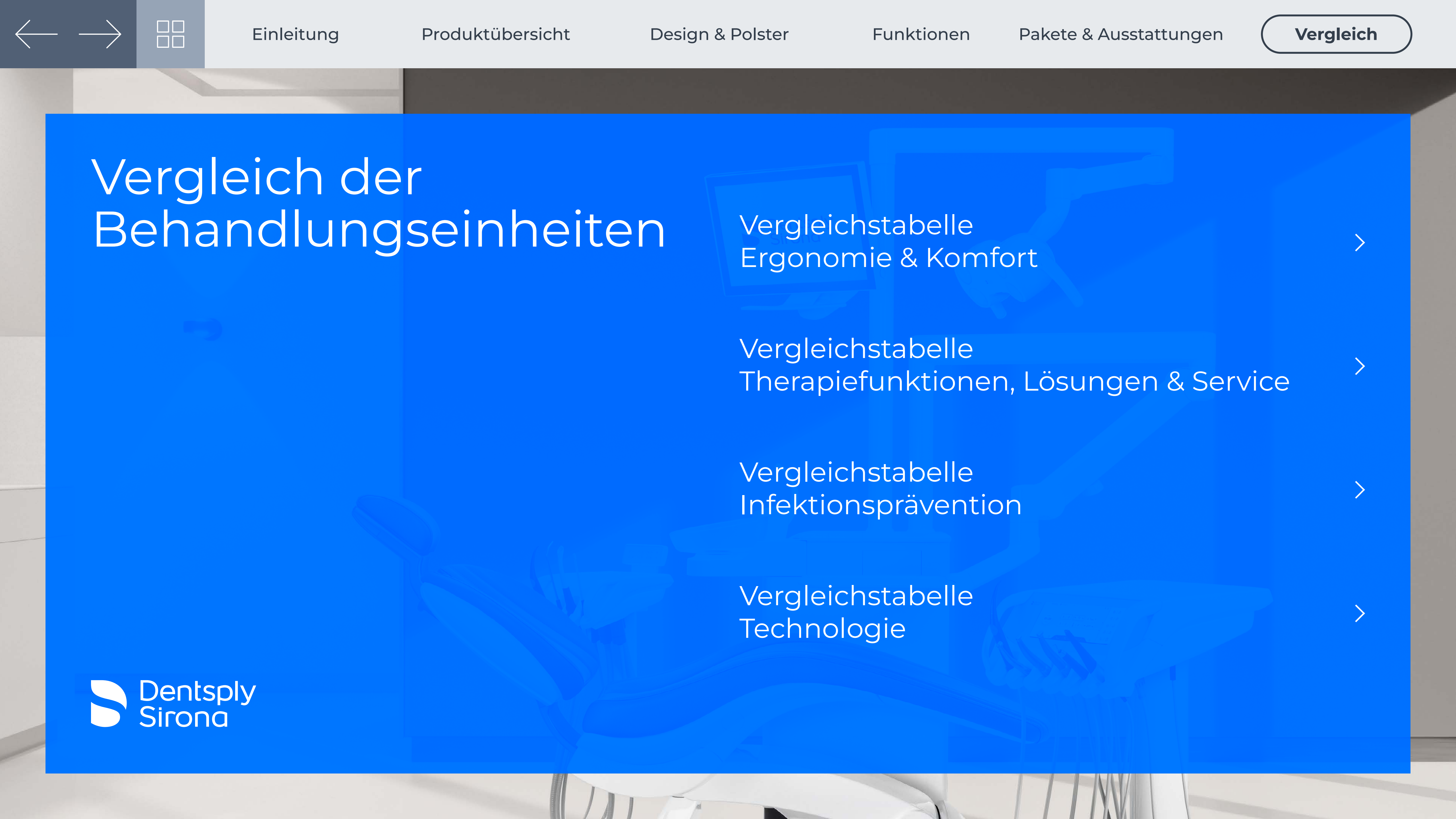

Vergleich der Behandlungseinheiten

Vergleichstabelle
Ergonomie & Komfort



Vergleichstabelle
Therapiefunktionen, Lösungen & Service



Vergleichstabelle
Infektionsprävention



Vergleichstabelle
Technologie



Vergleich der Behandlungseinheiten

Ergonomie und Komfort (1)

● = in der Basiseinheit enthalten
○ = optional
○ = nicht verfügbar

		Axano	Axano Pure	Sinius	Intego Pro	Intego
Behandlungskonzept	Motorische Verschiebebahn	●	○	○	○	○
	Manuelle Verschiebebahn	○	●	●	○	○
	Mit Schwingbügeln (CS)	○	○	●	●	●
	Mit Schwebetisch (TS)	○	○	●	●	●
	Version-Turn	○	○	○	○	○
Instrumentenpositionen		6+2	6+1	5+1 (Verschiebebahn/TS) 5 (CS Version)	5+1 (TS Version) 5 (CS Version)	5 (TS Version) 5 (CS Version)
Kopfstütze	Motorische Kopfstütze	●	○	○	○	○
	Doppelgelenk-Kopfstütze	○	●	●	○	○
	Flache Kopfstütze	○	○	○	●	○
Vertikale Mundpunktpositionierung		●	○*	○*	○	○
Fußsteuerung	Funk-Fußschalter Smart Control	●	●	○	○	○
	Funk-Fußschalter Classic	○	○	○	○	○
	Fußschalter Classic (mit Kabel)	○	○	●	○	●
	Pneumatischer Fußschalter	○	○	○	○	○

Vergleich der Behandlungseinheiten

Ergonomie und Komfort (2)

● = in der Basiseinheit enthalten
○ = optional
○ = nicht verfügbar

		Axano	Axano Pure	Sinius	Intego Pro	Intego
Massagefunktion		●	○	○	○	○
Lordosefunktion		●	○*	○*	○	○
ErgoMotion		●	●	●	○	○
Sirona Tray mit flexiblem Tragarm		○	○	○	○	○
Maximales Patientengewicht		180 kg	180 kg	165 kg	185 kg	185 kg
Arbeitsstühle	Hugo	○	○	○	○	○
	Carl	○	○	○	○	○
	Theo	○	○	○	○	○

Vergleich der Behandlungseinheiten

Therapiefunktionen, Lösungen und Service

● = in der Basiseinheit enthalten
○ = optional
○ = nicht verfügbar

		Axano	Axano Pure	Sinius	Intego Pro	Intego
Integrierte Therapiefunktionen	Endo mit integrierter Feilendatenbank	○	●	○	○	○
	Endo ohne integrierte Feilendatenbank	○	○	○	○	○
	Implantologie	○	○	○	○	○
	Apex Locator	○	●	○	○	○
DS Core		○	○	○	○	○
Service	Netzwerkverbindung für effizienten und digitalen Support bei Wartungsarbeiten über die Service-Software erforderlich	●	●	○	○	○
	Vor-Ort-Service mit Fehlerdiagnose über Netzwerkschnittstelle oder SD-Karte	○	○	●	●	●
	Ferndiagnose über Netzwerkschnittstelle	○	○	●	○	○

Vergleich der Behandlungseinheiten

Infektionsprävention

● = in der Basiseinheit enthalten
○ = optional
○ = nicht verfügbar

		Axano	Axano Pure	Sinius	Intego Pro	Intego
Desinfektionsanlage / Wasserversorgung	Integrierte Desinfektionsanlage	●	●	●	●	○
	Frischwasserflasche	○	○	○	○	●
Hygiene Cockpit		●	●	○	○	○
Sanieradapter zur Reinigung der Instrumentenschläuche		●	●	●	●	○
Saugschlauchreinigung mit Wasser		●*	●*	●*	●	●
Chemische Saugschlauchreinigung		●*	●*	●*	○	○
Selektive Saugablage im Assistenzelement		●	●	●	○	○
Chemische Mundspülbeckenreinigung		●	●	○	○	○

Vergleich der Behandlungseinheiten

Technologie

- = in der Basiseinheit enthalten
- = optional
- = nicht verfügbar

		Axano	Axano Pure	Sinius	Intego Pro	Intego
Bedienoberfläche	10.3" Smart Touch für bis zu 10 Nutzerprofile*	●	●	○	○	○
	EasyTouch (4.3") mit 6 Nutzerprofilen	○	○	●	○	○
	EasyTouch (4.3") mit 4 Nutzerprofilen	○	○	○	○	●
	EasyPad (keypad) mit 2 Nutzerprofilen	○	○	○	●	○
Monitor	22" Monitor Sivision	○	○	○	○	○
Intraoralkamera	SiroCam AF+	○	○	○	○	○
	SiroCam AF	○	○	○	○	○
Behandlungsleuchten	LEDview Plus	○	○	○	○	○
	LEDlight Plus	○	○	○	○	○
Mögliche Anzahl von Bohrantrieben (davon Elektromotoren)		4 (4)	3 (3)	3 (3)	3 (2)	3 (2)
Passende Motoren		BL ISO F BL Implant E	BL ISO F BL Implant E	BL ISO C BL Implant	BL ISO E	BL ISO E
Scaler		SiroSonic TL	SiroSonic TL	SiroSonic TL	SiroSonic L	SiroSonic L
Mögliche Position der SiroCam AF/AF+		Arztelement Pos. 2, 6 oder Zusatzablage	Arztelement Pos. 5 oder 6	Arztelement Pos. 5 (alle Ausführungen) oder Zusatzablage (Verschiebebahn, TS) Assistenzelement (CS, TS)	Arztelement Pos. 5 (CS, TS) oder Zusatzablage (TS) Assistenzelement (CS, TS)	

Die Verfügbarkeit von Optionen und Funktionen kann je nach Land variieren.

*mit festen Funktionstasten, konfigurierbar; Cursorsteuerung für Freihand-Bedienung

Verfügbare Video Tutorials



Axano: Innovation trifft Faszination

>



Axano Pure: Intuitiv einfach mehr

>



Sinius: Bereit für die Extrameile

>



Gestalten Sie Ihre Endo ENDOVIDUELL

>



Intego und Intego Pro: Alles, was ich brauche

>



Intego Pro Turn (TS): Workflow in Echtzeit

>



Intego Pro Turn (CS): Workflow in Echtzeit

>

Entdecken Sie mehr auf unserer Website



Behandlungseinheiten >



Axano >




Axano Pure >



Sinus >



Intego Pro >

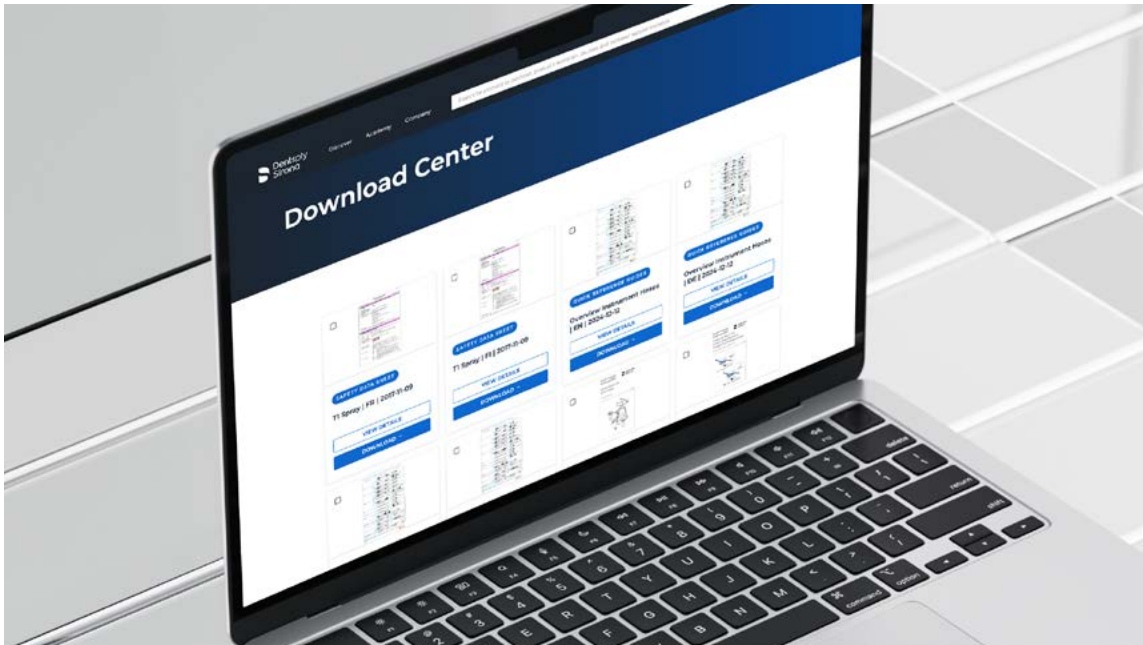

Download Center >



Energo >



Systeme zur Infektionskontrolle >



DENTSPLY SIRONA
Sirona Dental Systems GmbH
Fabrikstraße 31
64625 Bensheim
Germany

dentsplysirona.com

