

E-book

+
WE
KNOW
ENDO.



Casos clínicos **Endodontia**

Com sistema ProTaper Gold®

Segurança para você e seu paciente.

SUMÁRIO

Compartilhamos alguns casos clínicos, realizados por profissionais da endodontia, para que você possa apreciar os exemplos de preparos e suas conduções, conforme complexidades anatômicas, propiciando uma reflexão e fonte de inspiração para seu aprimoramento e abordagem clínica diária.

ProTaper Gold®	3
Patrícia Rodrigues	5
Edson Pelisser	6
Flares Baratto Filho	7
Guilherme Ferreira da Silva	8
Gustavo Ribeiro	9
Luiz Felipe Moreira	10
Marco Túlio Oréfice	11



+
WE
KNOW
ENDO.

Casos clínicos
preparados com
ProTaper Gold®

A SOLUÇÃO PROTAPER GOLD

ProTaper Gold®

A mesma técnica consagrada com maior flexibilidade.

A solução Protaper Gold é a **substituta de Protaper Universal**, pois apresenta a mesma conicidade e simplicidade de tratamento que você conhece e confia, com benefícios adicionais. Desenvolvida à partir de uma metalurgia avançada e patenteada, as limas rotatórias Protaper Gold oferecem maior flexibilidade e melhor desempenho para seu tratamento endodôntico.



Tamanhos dos instrumentos



Guta Percha Protaper
Universal Sortida



Ponta de Papel Protaper
Universal Sortida

ANTES

ProTaper® Universal estabelece um novo padrão em eficiência.

DEPOIS

O legado ProTaper® continua com o ProTaper Gold®





Dra.

Patrícia Rodrigues CRO-PA 2094

@patrodrigues16

@endobox_

- Doutora em Endodontia FOB/USP.
- Coordenadora do Mestrado Profissional em Clínica Odontológica Cesupa
- Professora de Endodontia do Cesupa e UFPa.
- Especialista em Dentística Restauradora FOB/USP
- Especialista em Implantodontia UFPa.
- Diretora da escola Trilha do Conhecimento

Depoimento profissional:



POR QUE VOCÊ ESCOLHEU ESTE PRODUTO OU COMO ELE TE AJUDOU?


O sistema Protaper Gold alia a eficiência de corte da família Protaper com o aumento de flexibilidade, em função do tratamento térmico dado aos instrumentos. Esses dois aspectos são importantes para se obter uma adequada formatação do canal com segurança.




Radiografias e Protocolo do caso:

Necrose pulpar dente 46. Caso Radix Paramolares. Raiz supranumerária na distal do dente 46. Foi realizado o acesso coronário, localização dos canais com limas tipo K #15. Exploração com Glide Path no Comprimento total do dente. Sequência de uso do sistema Protaper Gold: Canais mesiais e distais , SX, S1 (2mm aquém do comprimento aparente do dente) , Odontometria eletrônica, e na sequência S1, S2, F1, F2, F3 no comprimento de trabalho - Cimento Obturador: AH Plus - Cone Utilizado: Cone de Guta Percha Protaper F3

RX inicial

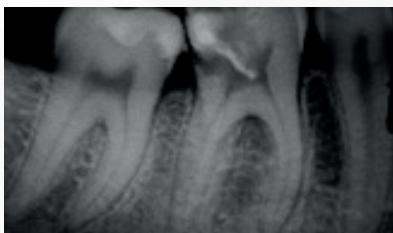

RX final

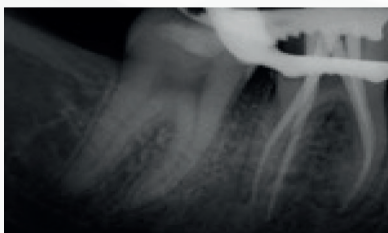

*Caso clínico cedido como cortesia pelo(a) profissional mencionado(a).



Dr.

Edson Pelisser - CRO-RS 9882

@endoedicas

- Especialista e mestre em endodontia
São Leopoldo Mandic - SP
- Douto em odontologia Positivo - PR
- Professor coordenador da especialização em endodontia

Depoimento profissional:

“

POR QUE VOCÊ ESCOLHEU ESTE PRODUTO OU COMO ELE TE AJUDOU?

Escolhi o sistema Protaper Gold porque já domino muito o sistema Protaper Universal e a liga GOLD, favoreceu o instrumento aumentando sua flexibilidade o que o torna excelente para casos com curvaturas mais acentuadas.


”

Radiografias e Protocolo do caso:

Dente 37 , necrose . Foi utilizado o sistema Protaper Gold , finalizado com F2 mesiais e F3 distal - Cimento Ah Plus - Blindagem da câmara pulpar com resina SDR



RX inicial

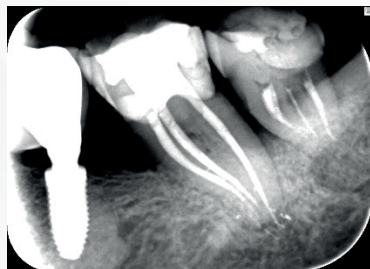

RX final

*Caso clínico cedido como cortesia pelo(a) profissional mencionado(a).



Dr.

Flares Baratto Filho - CRO-PR 10365

@flares_endodontia

- Especialista em Endodontia pela PUC/PR
- Mestre em Endodontia pela UNAERP/SP
- Doutor em Endodontia pela FOP/PE
- Pós-Doutor em Endodontia pela FORP/USP.
- Professor na Universidade da Região de Joinville (UNIVILLE) e na Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) e Coordenador do Curso de Especialização em Endodontia do IOA Boutique Curitiba.
- Editor-chefe do periódico RSBO
- Docente permanente nos Programas de Pós-graduação em Saúde e Meio Ambiente e de Engenharia de Processos.
- Experiência em pesquisa, docência e gestão na área de Odontologia, sendo bolsista produtividade nível 2do CNPq.
- No Google acadêmico possui índice h=26 e índice i10= 72, e no Scopus apresenta índice h=17.

Depoimento profissional:




POR QUE VOCÊ ESCOLHEU ESTE PRODUTO OU COMO ELE TE AJUDOU?

A curvatura apical apresentada pelo ILS e a possibilidade de alargamento cervical desse dente foram as razões de escolha do sistema Protaper Gold.



Radiografias e Protocolo do caso:

Dente 12, tratamento endodôntico de monorradicular, preparosistema Protaper Gold e obturação com McsPadden e cimento Ah Plus.

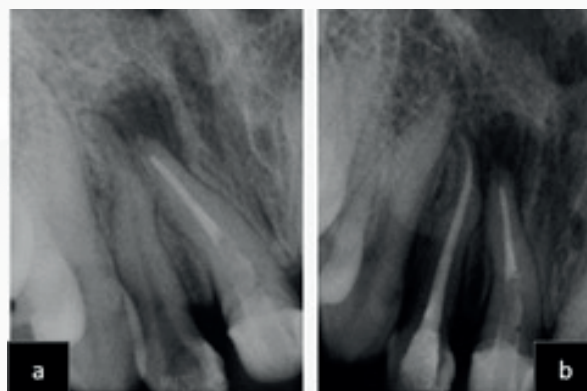

*Caso clínico cedido como cortesia pelo(a) profissional mencionado(a).



Dr.

Guilherme Ferreira da Silva - CRO-SP 82147

@guifsilvax

- Graduação em odontologia, UNESP Araraquara
- Mestrado, doutorado e pós-doutorado em Odontologia, área de Endodontia, UNESP Araraquara
- Pós-doutorado USP Bauru
- Professor de Endodontia e coordenador do curso de Odontologia do Unisagrado, Bauru, SP.

Depoimento profissional:

“

POR QUE VOCÊ ESCOLHEU ESTE PRODUTO OU COMO ELE TE AJUDOU?


O sistema protaper gold é uma ótima alternativa pela qualidade e versatilidade. Estas limas podem ser utilizadas nos diferentes tipos de casos clínicos, desde os mais simples aos mais complexos, aliando as vantagens do movimento rotatório, aumentando, assim, o sucesso dos tratamentos endodônticos.

”

Radiografias e Protocolo do caso:

Endodontia por finalidade protética (Biopulpectomia); dente 21, canal único. Obturação dos canais radiculares com cones de Guta Percha Protaper Universal e cimento AH Plus Jet

RX inicial

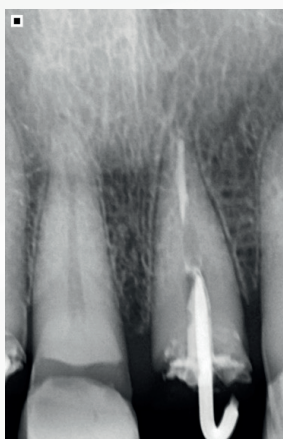

RX final



*Caso clínico cedido como cortesia pelo(a) profissional mencionado(a).



Dr.

Gustavo Ribeiro - CRO-RJ 19536

@endogustavo

- Especialista, Mestre e Doutor em Endodontia
- Prof. Adjunto de Endodontia - UERJ
- Prof. de Endodontia e Clínica Integrada - UVA
- Prof. de Especialização em Endodontia - UVA
- Experiência em clínica 28 anos.

Depoimento profissional:

“



POR QUE VOCÊ ESCOLHEU ESTE PRODUTO OU COMO ELE TE AJUDOU?

O sistema Protaper Gold em sua excelência é um sistema versátil com diâmetros e conicidades ideais principalmente onde visamos uma modelagem ativa em casos de necrose associada a lesão periapical.

”

Radiografias e Protocolo do caso:

Dente 36, necrose pulpar com extensa lesão periapical com comprometimento de furca. Tratamento Endodôntico realizado com Protaper Gold, solução irrigadora: hipoclorito de sódio 2,5% e edta 17%. irrigação ultrassônica passiva (PUI). Instrumentação dos canais mesiais até a lima F2 e canais distais até a lima F3. Obturação com Guta Core e cimento AH Plus.

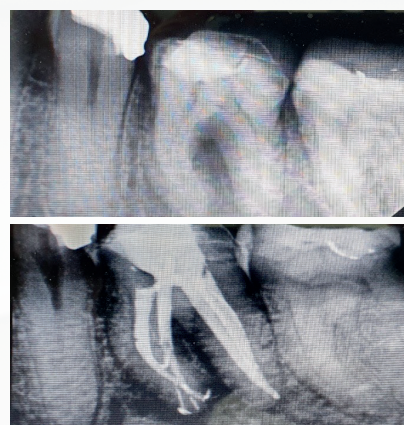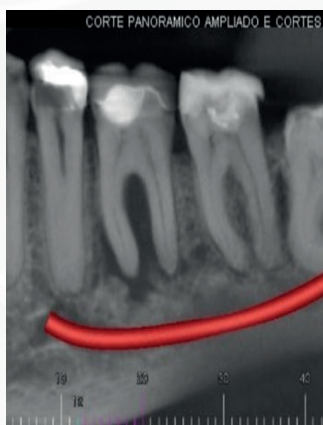

*Caso clínico cedido como cortesia pelo(a) profissional mencionado(a).



Dr.

Luiz Felipe Moreira - CRO-MG 39318

@Endo_luizfelipe

- Mestre e Especialista em Endodontia
SL Mandic - Campinas SP
- Professor em Endodontia - Graduação e Pós graduação
na Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE Governador
Valadares MG

Depoimento profissional:

“

POR QUE VOCÊ ESCOLHEU ESTE PRODUTO OU COMO ELE TE AJUDOU?

A escolha pelo sistema Protaper Gold se deu por suas propriedades fantásticas, onde foi possível aliar as propriedades do sistema mais utilizado mundialmente ao tratamento térmico Gold, potencializando as excelentes características desse sistema.

A escolha possibilitou realizar a limpeza e modelagem, navegando pela complexa anatomia de forma segura, proporcionada pelo tratamento térmico, que confere resistência e flexibilidade ao instrumento.

”




Radiografias e Protocolo do caso:

Dente : 46

Sistema de Instrumentação:

Protaper Gold

Cimento Obturador: AH Plus

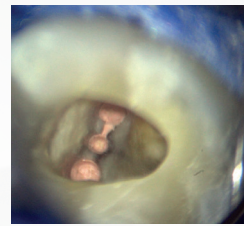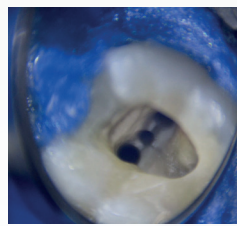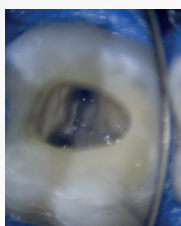

RX inicial



RX final

*Caso clínico cedido como cortesia pelo(a) profissional mencionado(a).



Dr.

Marco Túlio Oréfice - CRO-SP 40654

@drmarcoofefice

- Graduado pela Pontifícia Universidade Católica de Campinas 1988
- Especialização em Dentística Restauradora pela UNICASTELO em 1997
- Especialista em Endodontia pelo CPO São Leopoldo Mandic em 2010.
- Mestre em Endodontia pelo CPO São Leopoldo Mandic em 2012.

Depoimento profissional:

“

POR QUE VOCÊ ESCOLHEU ESTE PRODUTO OU COMO ELE TE AJUDOU?

Utilizei Protaper Gold pensando em promover desinfecção acentuada em região de terço médio e cervical pelo taper acentuado do instrumento nessa área, aliando segurança e alta flexibilidade, conferindo ótima previsibilidade em casos complexos. Além disso, um instrumento consagrado e com respaldo na literatura científica.


”

Radiografias e Protocolo do caso:

Necrose pulpar, dente 26, em decorrência de comprometimento periodontal. Utilização do Sistema Protaper Gold aliando flexibilidade e conicidade adequada à desinfecção desejada. Utilizei cones de guta percha com taper .06 e técnica de plastificação da guta percha.



RX inicial

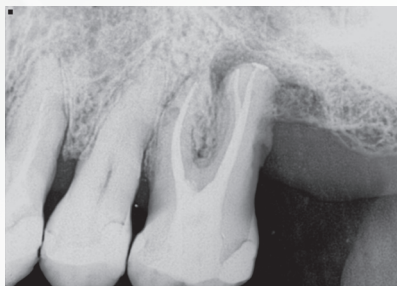

RX final

*Caso clínico cedido como cortesia pelo(a) profissional mencionado(a).

ProTaper Gold®



Maillifer Instruments Holding Sàrl. Chemin du Verger 3 - 1338 Ballaigues - Suíça.

Importado por: Dentsply Indústria e Comércio Ltda. - Rua José Francisco de Souza, 1926. Pirassununga, SP
CEP 13633-412 - CNPJ nº 31.116.239/0001-55 - Indústria Brasileira - www.dentsplysirona.com.br



SAC: 0800-771-2226 | (11) 3046 2222 (Brasil) - Responsável Técnico: Luiz Crepaldi CRQ-SP: 04208396

ANVISA Nº: 80196880257 (Limas Níquel Titânio Estéreis | Limas Para Odontologia)

ANVISA Nº: 80196880235 (GUTAPERCHA | Gutta-Percha), ANVISA Nº: 80196880254 (PONTAS DE PAPEL
ABSORVENTES ESTÉREIS | Cones de Papel Absorvente Odontológico).

EBOOK CASOS CLINICOS ENDO DS 1100-ARTECCO0743 Rev.00



Modo de preparo, condições de armazenamento, conservação, advertências e precauções: Vide Instruções de Uso.



[dentsplysirona.br](https://www.dentsplysirona.com.br)



Tenha um fluxo clínico
seguro e simples,
através das soluções
Endodônticas da
Dentsply Sirona!

