

# CEREC SW 5.2.11

## Updatebeschreibung (DE)

Dentsply Sirona freut sich, Ihnen das neue Update CEREC SW 5.2.11 vorstellen zu können. Das Update „CEREC SW 5.2.11“ ist eine Vollinstallation und benötigt keine vorinstallierte CEREC SW 5.2. Das automatische Update auf „CEREC SW 5.2.11“ wird nur angeboten, wenn eine CEREC SW 5.2.x installiert ist.

### Änderungen zur vorherigen Version 5.2.10:

Neue CEREC Primemill-Firmware Version 2.11.8

- Neue Wasserpumpensequenz in Routineaktionen
- Bugfix für Problem beim Festlegen einer statischen IP-Adresse

CEREC SpeedFire Firmware Version

- Einführung eines Sintermodus (Schnell/Ästhetisch), bisher nur für CEREC MTL Zirconia verfügbar
- Anpassungen der Benutzeroberfläche
- Kleinere Bugfixes

Neues Materialien

- Kuraray Noritake – neues Block Material: KATANA Avencia 2 ML
- Kuraray Noritake – neues Block Material: KATANA Avencia 2 HT
- Kuraray Noritake – neues Block Material: KATANA Avencia 2 OE (nur Japan)
- Kuraray Noritake – neues Block Material: KATANA Avencia P (nur Japan)
- SHOFU – neues Block Material: BLOCK PEEK (nur Japan)

Updates zu existierendem Material

- Dentsply Sirona – CEREC MTL Zirconia: neue Shades & Data Matrix Codes
- Dentsply Sirona – CEREC Cercon 4D Abutment: verfügbar in USA
- VITA – VITABLOCS Mark II & TriLuxe forte: neue Shades

Material SpeedFire process updates


- Dentsply Sirona CEREC MTL Zirconia
  - neue Sintering Prozesse für CEREC MTL Zirconia für Brücken
  - neuer Ästhetik Prozess für CEREC MTL Zirconia
- Ivoclar – Schnellere IPS e.max CAD Kristallisierung

SW Änderungen

- Bugfixes zum Support des Betriebssystems und von Grafikkartentreibern.
- Bugfixes für SW-Stabilität

## Installation & Lizenzen

- **Automatisches Update:**  
Eine Updatemeldung erscheint als Pop-up auf dem Desktop. Wählen Sie „Download“, um das Update direkt durchzuführen. Falls Sie das Update zu einem späteren Zeitpunkt durchführen wollen, ist dies jederzeit möglich. Möchten Sie das Update zu einem späteren Zeitpunkt durchführen, müssen Sie in der Windows-Taskleiste bei den Benachrichtigungssymbolen das Dentsply Sirona AutoUpdate Center öffnen.

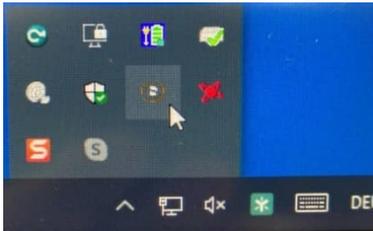

Im Dentsply Sirona AutoUpdate Center befindet sich das CEREC SW 5.2.11 Servicepack in der Updateliste. Der Download des Servicepacks kann gestartet und bei Bedarf angehalten und fortgesetzt werden. Nach Abschluss des Downloads kann die Installation der CEREC SW 5.2.11 gestartet werden.

- Führen Sie vor Beginn der Installation eine Datensicherung durch.
- Prüfen Sie vor Beginn der Installation in den Datenbankeinstellungen (CEREC SW: Konfiguration\Einstellungen\Patientendatenbank), dass die Patientendatenbank in einem eigenen Verzeichnis gespeichert ist – nicht in den obersten Ebenen eines Laufwerks (z.B. „D:\Data“ anstatt „D:\“).
- Installationsroutine nicht auf mehreren CEREC-Einheiten oder Arbeitsstationen gleichzeitig durchführen, wenn diese über ein Netzwerk verbunden sind.
- Um eine optimale Funktionalität Ihrer CEREC Software 5.2.11 sicherzustellen, ist die Nutzung des richtigen Grafikkartentreibers notwendig. Beim Starten der Software wird automatisch geprüft, ob Ihr Treiber korrekt ist. Sollten Sie eine Meldung erhalten, dass dies nicht der Fall ist, kontaktieren sie bitte den Kundenservice.
- Das Update von einer bestehenden CEREC SW 5.2.x auf CEREC SW 5.2.11 benötigt keine weitere Lizenz.